

Ocelový invalidní vozík BASIC

Kód výrobku: H011-B


1. Provedení

Invalidní vozík je vyroben z ocelového rámu s práškovým nástřikem. Má odolný nylonovo - bavlněný sedák v černé barvě. Obsahuje loketní opěrky v dlouhé verzi s funkcí naklápění. Vozík je vybaven zadními, 24" nafukovacími koly s pohodlnými plastovými výplety a předními 8" plnými koly z materiálu se zvýšenou odolností proti oděru. Další možnosti: celogumová zadní kola, stupačky s nastavitelným úhlem ohybu, polštář, stůl, držák berlí.

Sada obsahuje: rám vozíku se sedátkem, pravá stupačka s plošinou, levá podnožka s podnožkou, bezpečnostní páska, pumpa, sada klíčů pro složení/demontáž kočárku.

Součásti vozíku:

- a. madlo
- b. loketní opěrka
- c. tlačítko zámku loketní opěrky
- d. parkovací brzda
- e. hnací obruč
- f. stupačka
- g. montážní kolík stupačky

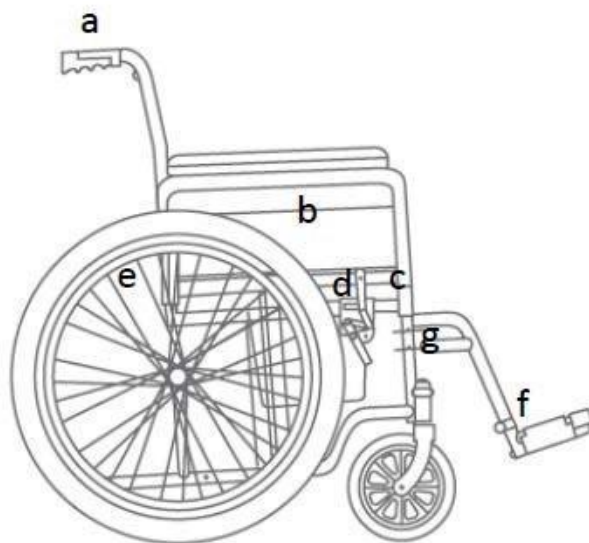

2. Použití

Ocelový invalidní vozík je pomocné zařízení pro osoby, které mají problémy se samostatným pohybem a pro osoby s dysfunkcemi a pohybovými omezeními. Je poháněn silou rukou uživatele nebo vedením doprovázející osobou.

Lze jej použít v interiéru i exteriéru.

3. Postup při SLOŽENÍ A ROZLOŽENÍ

Krok 1. Rozložení invalidního vozíku

Invalidní vozík by měl být umístěn na zemi. K rozložení vozíku použijte madla na zadní straně opěradla. Poté stiskněte okraje sedačky vpředu a vzadu tak, aby všechny prvky vozíku do sebe zapadly.

Krok 2. Montáž stupaček

Nainstalujte pravé a levé stupačky do přední části hlavního rámu tak, že je umístíte na dva čepy a otočíte je dovnitř, dokud se nezajistí.

Krok 3. Nastavení plošin stupaček

Postupně nastavte pravou a levou stupačku utažením šroubu umístěného na straně stupaček pomocí dodaného klíče. Ponechte vhodnou vzdálenost plošin stupaček od země, protože příliš nízké uspořádání plošin stupaček může způsobit potíže při pohybu vozíku v případě překážek, jako je obrubník. Opěrky nohou by měly být nastaveny tak, aby úhel mezi trupem a stehny byl přibližně 90° (uživatel tak bude mít optimální polohu sedu).

Krok 4. Instalace bezpečnostního popruhu

Nasaďte bezpečnostní popruh na stupačky. Tento popruh je navržen tak, aby chránil nohy uživatele před sklouznutím z plošin stupaček pod vozík během jízdy. **Pozor! Nepoužívejte vozík bez popruhu.**

Krok 5. Kontrola správné montáže hnacích kol

Lehce nadzvedněte invalidní vozík a poté otočte ve vzduchu střídavě pravé a levé kolo tak, že zatáhnete za hnací obruč a zkontrolujete, zda se správně pohybuje.

Po dokončení výše uvedených kroků je vozík připraven k použití.

OPĚTOVNÉ SLOŽENÍ VOZÍKU

Pro snadnější přepravu nebo skladování lze vozík opět složit.

- Před složením rámu vozíku sklopte desky stupaček a nastavte je do svislé polohy (kolmo k zemi).
- Chcete-li složit rám vozíku, vytáhněte sedačku nahoru, držte ji uprostřed vpředu a vzadu tak, aby rám vyskočil ze spojovacích prvků.

FUNKCE NAKLÁPĚNÍ LOKETNÍCH OPĚREK

- Stiskněte pojistné tlačítko umístěné poblíž loketní opěrky v přední části a sklopte ji dozadu.
- Chcete-li loketní opěrku zavřít, zatlačte ji dolů, aby se zajistilo pojistné tlačítko.

FUNKCE NAFUKOVÁNÍ KOL

- Vozík je vybaven 24" pumpovanými hnacími koly a 8" PU (bezdušovými) otočnými předními koly. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat tlak vzduchu v obou kolech. Kontrolovat by se měl i stav plášťů – zda na nich nejsou oděrky, zářezy nebo povrchové vady.
- Chcete-li vyrovnat tlak vzduchu v pneumatikách, odšroubujte uzávěr ventilku, vložte ventil do otvoru pumpy (součástí sady) a poté vstříkněte vzduch na požadovanou hodnotu tlaku.

FUNKCE PARKOVACÍCH BRZD

- Pro zablokování kol posuňte brzdovou páku dopředu, dokud se kolo zcela nezablokuje (zvláště pro levé a pravé kolo). Vezměte prosím na vědomí, že parkovací brzda zablokuje kola pouze při zastavení.

SEŘÍZENÍ PARKOVACÍCH BRZD

Správné zablokování parkovací brzdy závisí na jejím seřízení a nastavení. Brzdový dřík by měl být nastaven tak, aby brzdová destička bezpečně zablokovala kolo a páka nenarážela na nadměrný odpor.

- V případě nadměrného odporu mírně posuňte hřídel dopředu vyšroubováním aretačního šroubu umístěného na druhé straně brzdy (zevnitř vozíku) a nastavením do takové polohy, aby brzda snadno a bez odporu zablokovala kolo.
- Pokud se brzdová noha zcela nedotýká kola a dostatečně jej neblokuje, postupujte podle výše uvedeného postupu a pohybujte stopkou brzdy v opačném směru.

FUNKCE PÁSU PRO UŽIVATELE

- Pro výběr vhodného pásu kontaktujte prodejce.

4. Technické specifikace

Celková šířka	61-67 cm
Vnitřní šířka	43, 46, 48 cm
Celková hloubka	101 cm
Výška sedáku od země	48 cm
Celková výška	90 cm (86,5 cm)

Rozměry sedáku	42, 45, 47 cm x 40 cm
Hmotnost	16,8-17,5 kg*
Max. zatížení	115 kg*
Složené rozměry	30 cm
Barva rámu	stříbrná

* v závislosti na šířce sedadla

5. Poznámky a doporučení

Timago International Group nenese odpovědnost za nesprávné použití invalidního vozíku, nedodržení bezpečnostních pravidel a použití v rozporu s určením.

6. Čištění a údržba

Měla by být prováděna pravidelná údržba komponentů invalidního vozíku:

- Čalounění a polštář lze čistit studenou nebo teplou vodou pomocí vlhkého (ne mokrého) hadříku a bez použití saponátů. Odolnější skvrny by se měly čistit houbou. Při údržbě čalounění dbejte na to, abyste jej příliš nenamáčeli. Uchovávejte v suchu mimo zdroje tepla.
- Plastové prvky by se měly čistit vlhkým hadříkem, případně s použitím čisticích prostředků na plasty. Při používání mycích prostředků dodržujte bezpečnostní pravidla.

7. Podrobnosti o záruce

Na všechny produkty distribuované naší společností se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou popsány v záručním listu, který jste obdrželi při nákupu. Zároveň bychom rádi upozornili, že si pro účely záruky musíte uschovat doklad o koupi (účtenka nebo faktura).

8. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnická pomůcka
	Pozor		Přečtěte si manuál
	Výrobce posoudil shodu se základními požadavky na zdravotnické prostředky.		

Celá nabídka je Vám k dispozici u našich distributorů. Více se dozvíte na: www.timago.com **Děkujeme, že jste si vybrali Timago!**



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



2. vydání, datum aktualizace 29.03.2021