

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:

Výrobky řady *zvýšených záchodových prkének s předním uzamykacím systémem KING* jsou navrženy tak, aby zvyšovaly výšku záchodové mísy, usnadňovaly sezení a vstávání a podporovaly nezávislost a pohodlí. Stabilitu prkénka zajišťuje přední uzamykací systém. Modely s pevnými nebo sklopnými loketními opěrkami dále zvyšují bezpečnost a pohodlí a umožňují samostatnější používání prkénka.

INDIKACE A KONTRAINDIKACE:

Výrobky řady *zvýšených záchodových prkének s předním uzamykacím systémem KING* jsou určeny starším lidem, vozíčkářům, lidem se sníženou pohyblivostí bederní, kolenní nebo kyčelní oblasti a všem, kteří mohou mít potíže se sezením a vstáváním z toaletní mísy. Díky sklopným područkám je prkénko vhodné zejména pro vozíčkáře, kteří se na záchodové prkénko přesouvají ze strany.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY:

- Maximální hmotnost uživatele uvedená v návodu k montáži nesmí být překročena.
- Před každým použitím se ujistěte, že je výrobek na WC ve stabilní poloze a že je na něm správně upevněn pomocí dodaného zajišťovacího systému.
- Područky musí být vhodně sestaveny a během používání musí být pohyblivá část správně zaháknuta, jak je znázorněno na montážních obrázcích v uživatelské příručce.
- Při montáži striktně dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
- Prkénko a její součásti nijak neupravujte.
- Nepoužívejte prkénko, pokud je poškozené nebo jakkoli upravené.
- Ujistěte se, že je výška prkénka taková, aby jeho používání bylo pro uživatele snadné a bezpečné.
- Při sezení nebo stání se o prkénko neopírejte.
- Při používání se vyhněte polohám, při kterých je váha těla příliš vpředu. Nesprávná poloha může vést k uklouznutí a pádu uživatele.
- Prkénko nesmí být skladováno venku.

INFORMACE O ÚDRŽBĚ:

Údržba výrobku spočívá v čištění a sanitaci. Aby bylo zaručeno bezpečné používání a odpovídající hygienický standard, měl by uživatel před každým použitím provést tyto kroky. Uživatel se musí ujistit o konstrukční celistvosti zařízení a jeho součástí a musí zkontrolovat těsnost šroubů. Při čištění a sanitaci postupujte podle následujících pokynů:

1. Používejte rukavice.
2. Před zahájením co nejpřesnější dezinfekce odstraňte zjevné nečistoty.
3. K čištění používejte vodu nebo neagresivní čisticí prostředky.
4. Otřete je suchým a čistým hadříkem.

Případně lze výrobek čistit v domácích myčkách nádobí při maximální teplotě.

POŽADAVKY NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ:

Výrobek je vhodný pro opakované použití jinými uživateli. Před dalším použitím musí být výrobek řádně vyčištěn a vydezinfikován. Před předáním výrobku jiným osobám musí být výrobek zkontrolován kvalifikovanými prodejci.

SPRÁVNÝ POSTUP LIKVIDACE:

Výrobek nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Informujte se předem na místním úřadě o správném a ekologickém způsobu likvidace.


HLÁŠENÍ INCIDENTŮ:

Dojde-li u tohoto zařízení k závažnému incidentu, kontaktujte výrobce tohoto výrobku na adrese info@kingbathrooms.com a příslušný úřad ve vaší zemi.


KÓD POLOŽKY	POPIS	STRANA
KING-12-KN	Zvýšené záchodové prkénko 12 cm/5in King	44
KING-12A-KN	Zvýšené záchodové prkénko 12 cm/5 palců s pevnými područkami King	45
KING-12FA-KN	Zvýšené záchodové prkénko 12 cm/5 palců se sklopnými područkami King	46-47

IKONY	POPIS
	Vyrobena v Itálii
	Nástroje Montáž zdarma
	Vhodné do myčky
	Maximální hmotnost uživatele
	2 roky záruka
	Naskenujte QR KÓD pro montážní video
	Područky jsou určeny k tomu, aby uživateli pomáhaly sedět ve více klidové poloze a poskytovaly další oporu, na které může uvolnit část tělesné hmotnosti při sezení nebo vstávání. Nesmí se však používat k tomu, aby se o ně úplně opírali. Pro bezpečné používání nepřekračujte maximální zatížení specificky doporučené pro područky.


KING-12-KN

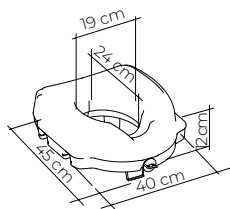


1

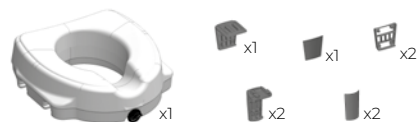

A

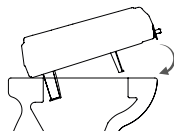


2

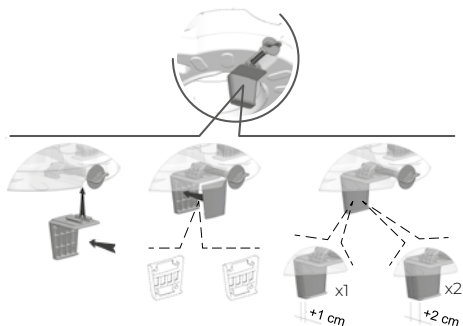


B




3

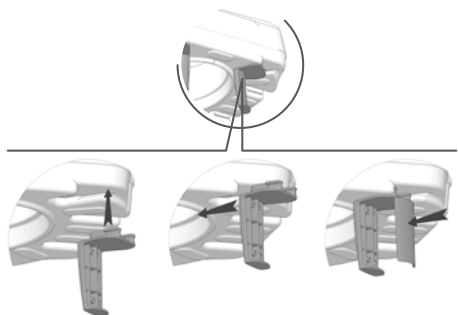


C

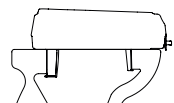

KING-12A-KN

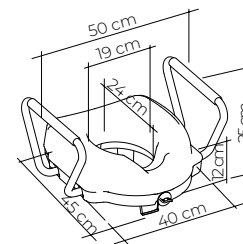

1

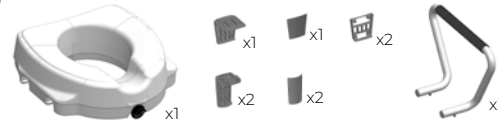

2




2




3




3

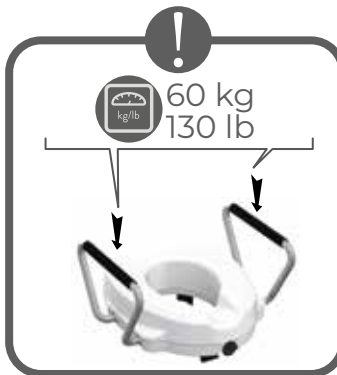


A

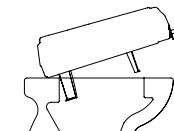

B

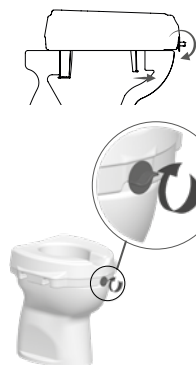

C

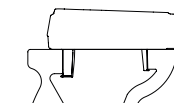

130 kg
285 lb


CE MD




130 kg
285 lb

CE MD


KING-12FA-KN

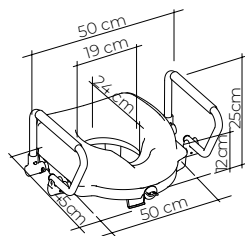


1

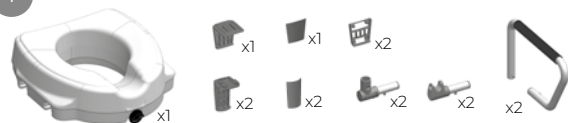


2

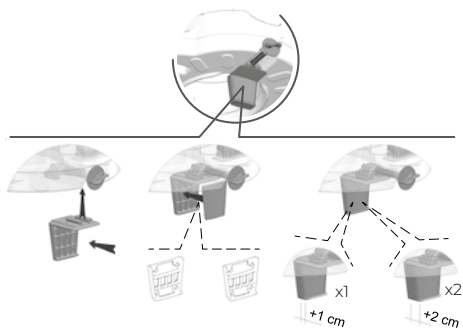


3

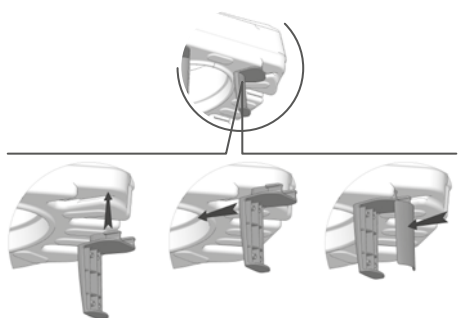


A

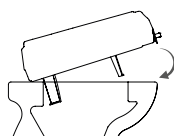

B

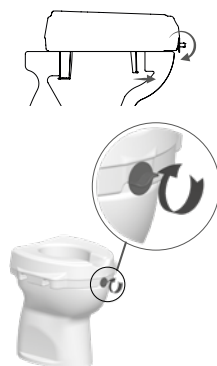


C

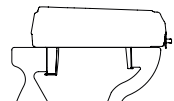


40 kg
85 lb



4

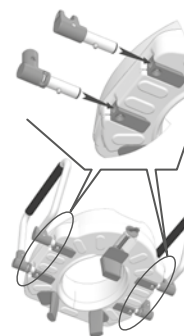

5

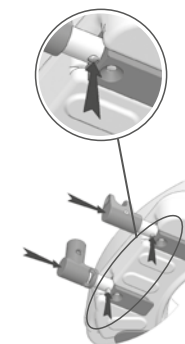

6



130 kg
285 lb

CE MD