

NÁVOD K OBSLUZE

Hliníkový invalidní vozík

Kód výrobku: T101




1. Provedení

Vozík má z hliníkový křížový rám. Má odolné nylonově-bavlněné sedátko s přídavným polštářem a pásem pro uživatele. Sklopné loketní opěrky jsou vyprofilované. Vozík má funkci rychlé demontáže kol, kolečka proti převrácení a opěradlo, které lze pro lepší přepravu zalomit. Podnožky jsou ve sklopném provedení. Zadní kola mají průměr 24 " (s duší nebo plná) a jsou vybavena hliníkovou hnací obručí, přední, loukoťová kola jsou plná a mají průměr 8 ". Pro uživatele s amputovanými dolními končetinami má vozík možnost nastavení těžiště na předních i zadních kolech. Vozík je vybaven brzdami pro doprovodnou osobu, která jej vede. Sada obsahuje: rám vozíku včetně sedátka, pravou a levou podnožku včetně stupačky, bezpečnostní pás, pumpičku.

Součásti vozíku:

- a. madlo
- b. brzda pro doprovodnou osobu
- c. loketní opěrka
- d. motýlek blokády loketní opěrky
- e. parkovací brzda
- f. hnací obruč
- g. rychlospojka
- h. podnožka
- i. páka podnožky
- j. nastavení těžiště
- k. kolečka proti převrácení
- l. blokáda zalomení opěradla

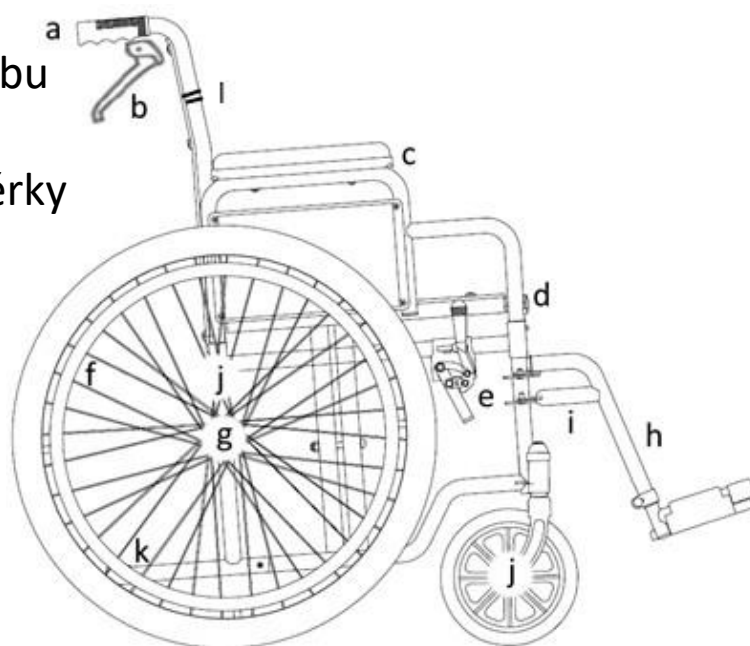

2. Použití

Hliníkový invalidní vozík je pomocné vybavení určené pro osoby, které mají problém se samostatným pohybem, a také pro osoby s pohybovou nefunkčností a omezeními. Je poháněn silou paží uživatele nebo druhou osobou, která vozík vede. Může být používán jak v interiéru, tak v exteriéru.

3. Montáž

1. krok Rozložení vozíku

Vozík postavte na zem. Pomocí madel, která jsou vzadu za opěradlem, vozík rozložte. Následně zatlačte na boční okraje sedáku tak, aby do sebe všechny součásti vozíku zapadly.

2. krok Montáž podnožek

Namontujte pravou a levou podnožku. Montážní prvek vložte do otvoru v přední části rámu a otočte podnožku dovnitř, až do okamžiku zablokování páky podnožky.

3. krok Nastavení stupaček podnožek

Nastavte postupně pravou a levou stupačku podnožky, a to dotažením šroubu ve správném montážním otvoru. Podnožky nastavte tak, aby byl úhel mezi trupem a stehny cca 90 ° (optimální poloha vsedě).

4. krok Opěrný pás pro nohy

Nasadte na podnožky opěrné pásy pro chodidla. Úkolem pásů je ochrana uživatelových nohou před jejich sesunutím se během jízdy dozadu, pod vozík. Nepoužívejte vozík bez nasazených opěrných pásů pro nohy.

5. krok Kontrola zda jsou velká/hnací kola správně nasazena

Lehce nadzvedněte vozík a pomocí hnací obruče zatočte ve vzduchu postupně pravým a levým kolem, zkontrolujte při tom, zda jsou kola správně nasazena a bez problémů se otáčejí. **Po provedení výše uvedených činností je vozík připraven k použití.**

OPĚTOVNÉ SLOŽENÍ VOZÍKU

Před složením rámu vozíku sklopte stupačky podnožek nahoru tak, aby byly svisle (kolmo k zemi). Potom uchopte sedátko v polovině šířky a zvedněte jej nahoru, až do složení rámu vozíku.

SKLOPENÍ LOKETNÍCH OPĚREK

- Pokud chcete sklopit loketní opěrku, otočte motýlek blokády

loketní opěrky, který se nachází v její přední části, směrem dolů a potom můžete loketní opěrku odklopit směrem nahoru.

- Pro uzavření loketní opěrky ji sklopte směrem dolů a motýlek blokády loketní opěrky otočte směrem nahoru.

HUŠTĚNÍ PNEUMATIK (neplatí pro verzi s plnými zadními 24" koly, které se nehustí)

- Vozík je vybaven hnacími koly průměru 24 " s duší a předními, loukoťovými, otočnými koly z PU (plnými) průměru 8 ". Pamatujte, že tlak v obou hnacích kolech je nutné pravidelně kontrolovat. Kontrolovat se musí také stav pneumatik – zda nejsou prodřené, prasklé nebo příliš sjeté.
- Pro vyrovnaní tlaku vzduchu v pneumatice odšroubujte čepičku ventilkou, nasadte na ventilek pumpičku (která je součástí sady) a napumpujte pneumatiku na požadovaný tlak.

ZALOMENÍ OPĚRADLA

- Pokud chcete sklopit/zalomit opěradlo, stiskněte současně obě blokády a sklopte/zalomte opěradlo směrem dozadu vozíku.

POUŽITÍ PARKOVACÍ BRZDY

- Pro zablokování kol v parkovací poloze zatlačte páku parkovací brzdy zcela dopředu, do okamžiku, kdy je kolo zcela zablokováno (pro levé a pravé kolo zvlášť). Zapamatujte si, že parkovací brzda slouží k zablokování kola pouze, pokud je vozík v klidu a nejede.

POUŽITÍ POMOCNÉ BRZDY (PRO OSOBU, KTERÁ VEDE VOZÍK):

- Páky brzd jsou umístěny u model vozíku na pravé a levé straně a s pákami ruční brzdy u kol jsou spojeny bovdeny.
- Pro zabrzdění stiskněte páku brzdy, pro odbrzdění páku povolte. Brzděte plynule a používejte k tomu přiměřenou sílu.

- Brzdy jsou vybaveny funkcí parkovací brzdy. Pokud chcete použít parkovací brzdu, stiskněte páku brzdy a zajistěte prvek blokády (který se nachází u páky brzdy).

NASTAVENÍ PARKOVACÍ BRZDY

- Pokud je odpor brzdy příliš velký, lehce vysuňte třmen směrem dopředu, docílíte toho vyšroubováním šroubu blokády, který se nachází na druhé straně brzdy (z vnitřní strany vozíku), a nastavením do takové polohy, ve které bude brzda snadno a bez odporu brzdit kolo.
- V případě, že se patka brzdy plně nedotýká kola a dostatečně jej nebrzdí, postupujte, jak je uvedeno výše, ale třmen brzdy vysuňte opačným směrem.

POUŽITÍ PÁSŮ PRO UŽIVATELE

- Pás, kterým je vozík standardně vybaven slouží k zajištění trupu, v případě, že uživatel sjíždí z vozíku, nebo nedokáže samostatně udržet správnou polohu.

NASTAVENÍ PRO OSOBY PO AMPUTACI V OBLASTI DOLNÍCH KONČETIN

- Pro nastavení předních kol odšroubujte upevňovací šroub postupně na pravém a levém kole. Následně nastavte úhel naklonění sedátka posunutím osy upevnění kola nahoru nebo dolů na obou kolech stejně. Stejně nastavte také zadní kola.
- Úhel naklonění sedátka musí být nastaven tak, aby uživatel nesjížděl z vozíku, a zároveň tak, aby mu zvolené nastavení nezesnadňovalo volný pohyb pomocí hnacích obručí na zadních kolech.

4. Technická specifikace

Celková šířka	61 / 63 / 65 / 67 / 69 / 75 cm *
Vnitřní šířka	41 / 43 / 46 / 48 / 51 / 56 cm *
Celková hloubka	107 cm

Výška sedátka nad podkladem	50 cm
Celková výška	95 cm
Rozměry sedáku	41 / 43 / 46 / 48 / 51 / 56 x 42 cm *
Hmotnost	15,5 / 16 / 16,5 / 17 / 17,5 / 18 kg *
Max. zatížení	125 kg
Šířka po složení	30 cm
Barva rámu	stříbrná anebo černá

* v závislosti na šířce sedáku

5. Poznámky

Společnost Timago International Group není zodpovědná za nesprávné používání invalidního vozíku, nedodržování bezpečnostních pravidel a také za použití, které není v souladu s jeho určením.

6. Čištění a údržba

Pravidelně provádějte údržbu jednotlivých součástí vozíku: Čalounění a přídatný polštář myjte studenou nebo teplou vodou vlhkým (ne však mokrým) hadříkem bez použití detergentů. Odolnější skvrny umyjte houbičkou. Při údržbě čalounění se snažte, abyste jej příliš nesmáčeli. Vozík sušte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Plastové součásti umývejte navlhčeným hadříkem, případně s použitím prostředků na čištění plastů. Při této činnosti postupujte podle návodu výrobce čisticího prostředku a také v souladu s bezpečnostními pravidly pro používání detergentů.

7. Podmínky skladování a doprava

Nevystavujte výrobek přímému působení slunečních paprsků, vody a vlhka.

8. Údaje týkající se záruky

Na výrobek se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou specifikovány v záručním listu, který jste dostali s výrobkem. Pro případnou reklamaci si uschovejte doklad o prodeji (fakturu nebo paragon).

9. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem
	Výrobce provedl posouzení shody se zásadními nároky na zdravotnické prostředky.		

Kompletní nabídku najdete u našich distributorů. Zjistěte více na **www.timago.com**

Děkujeme, že jste si vybrali Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



IV. vydání, datum aktualizace 29.8.2024