

Podpěra k toaletě

Kód výrobku: JMC-C 5300KD

1. Provedení


Podpěra k toaletě je vyrobena z ultralehkého eloxovaného hliníku. Pro zajištění co nejlepšího přizpůsobení potřebám uživatele má podpěra stavitelnou výšku a šířku.

Sada obsahuje:

- Levá strana podpěry
- Pravá strana podpěry
- Spojka

Součástí podpěry k toaletě:

- a. loketní opěrky
- b. nastavení šířky
- c. montážní prvek
- d. nastavení výšky s aretačním čepem
- e. protiskluzové násadky

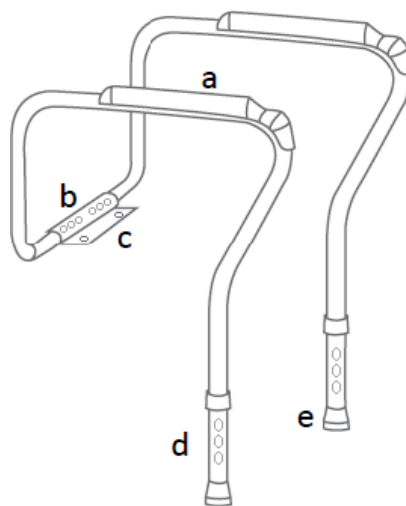

2. Použití

Podpěra k toaletě je pomocné vybavení, které uživateli umožňuje provádění fyziologických potřeb. Je doporučována osobám s pohybovou nefunkčností a omezeními a také pro osoby, které nejsou schopny samostatně se posadit nebo vstát. Stavitelná šířka a výška umožňuje přizpůsobit podpěru rozměrům klozetové mísy, včetně záchodového prkénka, u níž má být použita.

3. Montáž

- Nejdříve demontujte záchodové prkénko. Za tímto účelem povolte šrouby, kterými je prkénko uchyceno k toaletě.
- Oporu k toaletě umístěte tak, aby otvory v montážním prvku lícovaly s montážními otvory záchodového prkénka v klozetové míse.
- Následně složte rám opory k toaletě.
- Pro nastavení správné šířky stiskněte kovový aretační čep, který se nachází u montážního prvku, zvolte vhodnou šířku vnitřní trubky a potom zablokujte vzájemnou polohu trubek vůči sobě.
- Pro nastavení správné výšky stiskněte kovový aretační čep, který se nachází na noze opory k toaletě, zvolte vhodnou výšku vnitřní trubky a potom zablokujte vzájemnou polohu trubek vůči sobě.
- Nakonec namontujte záchodové prkénko zpět.

Pozor! Po nastavení musí být čepy na všech nohách ve stejné výšce. Nohy musí stát na podkladu vždy stabilně.

4. Technická specifikace

Celková šířka	53–63 cm
Celková hloubka	47 cm
Výška	64–74 cm
Rozměry sedáku	47 cm x 42 cm
Hmotnost	0,4 kg
Maximální zatížení	100 kg
Barva rámu	stříbrná

5. Poznámky a doporučení

Společnost Timago International Group není zodpovědná za nesprávné používání opory k toaletě, nedodržování bezpečnostních pravidel a také za použití, které není v souladu s jeho určením.

6. Údržba

Prohlídky

Provádějte pravidelné vizuální prohlídky všech spojovacích prvků (zarážky a závěsy) výrobku, včetně:

- stavu aretačních čepů pro nastavení výšky
- stability a vzhledu nosného rámu

Čištění

Pravidelně, samostatně provádějte kontrolu technického stavu opory k toaletě:

- Oporu k toaletě pravidelně myjte, používejte pouze vodu a jemné detergenty, které mají atest PZH [Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Národní institut veřejného zdraví - Státní hygienický ústav]. Po umytí oporu k toaletě pečlivě osušte.
- Na čištění **nepoužívejte**: ostré lešticí přípravky, silné detergenty, brusné prostředky, benzín ani žádná jiná rozpouštědla (riziko poškození rámu, viditelných poškození a v jejich důsledku – ztráty záruky).

7. Údaje týkající se záruky

Na všechny výrobky, které dodává naše společnost, se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listě, který jste obdrželi v okamžiku jejich zakoupení. Současně bychom vás rádi upozornili, že při případné reklamaci je nutné předložit doklad o prodeji (fakturu nebo paragon), proto si jej uschovejte.

8. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem
	Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky, které se týkají zdravotnických potřeb.		

Kompletní nabídku najdete u našich distributorů. Zjistěte více na **www.timago.com**

Děkujeme, že jste si vybrali Timago!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



II. vydání, datum aktualizace 29.03.2021