

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Chodítko čtyřkolové hliníkové

Kód produktu: YOLA



1. Charakteristika

Čtyřkolové chodítko je vyrobeno z lakovaného hliníku. Má přední a zadní kola o průměru 8", výškově nastavitelné rukojeti s anatomickými úchyty, brzdy s parkovací funkcí, sedátko s výškově nastavitelnou opěrkou zad a tašku. Konstrukce je založena na křížovém rámu a oválném průřezu trubek, díky čemuž je výrazně zvýšena odolnost vůči axiálnímu tlaku. Chodítko je vybaveno držákem na hůl pro pohodlné každodenní používání.

Součástí sady je: rám se sedátkem, přední a zadní kola, opěrka zad, taška, držák na hůl.

Prvky chodítka:

- A. Rukojeti
- B. Brzda s parkovací funkcí
- C. Výškově nastavitelná opěrka zad
- D. Sedátko s madlem
- E. Taška
- F. Nastavení výšky
- G. Držák na hůl
- H. Mechanismus skládání zadních kol
- I. Přepínač skládání předních kol
- J. Zadní a přední plná 8" kola



2. Použití

Chodítko je určeno pro pacienty se sníženou pohyblivostí, kteří potřebují stabilní oporu a pomoc při chůzi. Je také doporučeno pro starší osoby jako pomůcka při udržování rovnováhy za účelem zlepšení komfortu chůze a zajištění bezpečnosti před pádem. Použití chodítka má pozitivní vliv na návrat k aktivitě u lidí s problémy s pohybem a s obtížemi při přechodu do vzpřímené polohy. Zaručuje lepší stabilizaci, oporu a bezpečnost při chůzi.

3. Sestavení

MONTÁŽ

Krok 1. Vyjměte chodítko a jeho části z krabice.

Krok 2. Spusťte přední kola dolů, dokud neuslyšíte charakteristické „cvaknutí“ červeného skládacího přepínače (I). Potáhněte červený skládací mechanismus (H) směrem k sobě a sklopte zadní kola dolů, dokud neuslyšíte charakteristické „cvaknutí“.

Krok 3. Vložte rukojeti do otvorů v rámu a zajistěte je aretačními kolíky.

Krok 4. Pro úplné rozložení chodítka ho chyťte za sedátko a roztáhněte směrem ven. Stiskněte sedátko z obou stran, dokud neuslyšíte charakteristické „cvaknutí“.

Krok 5. Nainstalujte opěradlo zasunutím do speciálních montážních otvorů umístěných pod rukojetmi. Tašku připevněte k přední části chodítka pomocí popruhů.

Krok 6. Nainstalujte držák na hůl nebo lahev na obě strany chodítka.

Krok 7. Zkontrolujte, zda je chodítko správně sestavené, plně rozložené a zda nechybí žádné části nebo šrouby. Pokud zjistíte poškození nebo chybějící díly, kontaktujte prodejce.

Chodítko je připraveno k použití.

SKLÁDÁNÍ

- Pro složení chodítka opakujte výše uvedené kroky v opačném pořadí.
- Stiskněte skládací přepínač (I) na předních kolech pro sklopení kol směrem nahoru.

NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRKY ZAD

Pro nastavení výšky opěradla odšroubujte matice umístěné pod brzdovými rukojetmi, nastavte opěradlo do požadované výšky a utáhněte zpět matice na obou stranách.

Poznámka! Ujistěte se, že obě strany opěrky jsou nastaveny na stejnou výšku.

NASTAVENÍ VÝŠKY RUKOJETÍ

Pro nastavení výšky rukojeti:

- Stiskněte brzdovou páčku dolů, aby se aktivovala parkovací brzda a chodítko se znehybnilo.
- Stiskněte aretační kolík umístěný na rámu a nastavte výšku rukojeti. Stejně upravte i druhou stranu.
- Poté odblokujte parkovací brzdu.

POZOR! Obě rukojeti by měly být nastaveny na stejnou výšku.

FUNKCE BRZDY

- Pro zastavení chodítka zatáhněte brzdovou páčku nahoru a držte ji.
- Při zastavení nebo používání sedátka zajistěte brzdu v parkovací poloze zatažením brzdové páky dolů.
- Pro uvolnění parkovací brzdy zatáhněte páčku nahoru.

4. Technické údaje

Celková šířka	65 cm
Celková délka	69 cm
Šířka sedátka	46 x 25 cm
Výška sedátka od země	55 cm
Nastavení výšky rukojeti	81-97 cm
Hmotnost chodítka	8,20 kg
Maximální nosnost	136 kg
Maximální nosnost tašky	5 kg
Barva rámu	matná černá, tyrkysová, šedá

5. Poznámky

Společnost Timago International Group nenese odpovědnost za nesprávné používání výrobku, nedodržování bezpečnostních pokynů a za používání v rozporu s určením.

6. Údržba

- Rám čistěte vlhkým hadříkem a důkladně osušte.
- Nepoužívejte abrazivní lešticí prostředky, aby nedošlo k poškození ochranných vrstev.
- Pravidelně odstraňujte nečistoty z pohyblivých částí chodítka (panty, upínací šrouby, zámky).

7. Podmínky skladování a přepravy

Chodítko nevystavujte přímému slunečnímu záření, vodě ani vlhkosti.

8. Informace o záruce

Všechny produkty distribuované naší společností jsou kryty zárukou, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listu dostupném na našich webových stránkách. Kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Mějte prosím

na paměti, že pro uplatnění záruky je nutné uchovat doklad o koupi (účtenka nebo faktura).

9. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže (LOT)		Kód UDI
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Poznámka		Přečtěte si, prosím, návod k použití.
	Výrobce ověřil shodu s podstatnými požadavky na zdravotnické prostředky.		

Celá nabídka je pro vás dostupná u našich distributorů. Více se můžete dozvědět na **www.timago.com**. Děkujeme vám, že jste si vybrali Timago!