

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:

Výrobky řady *Toaletní křesla KING* umožňují uživateli dosáhnout větší samostatnosti a nezávislosti při používání toalety a sprchy, snižují svalovou únavu způsobenou stáním i riziko uklouznutí a zranění. Toaletní křeslo lze nastavit ve třech různých konfiguracích:

- Umístění přímo na WC jako alternativa k jeho přímému použití umožňuje koncovému uživateli mít širší a pohodlnější prkénko, než jaké je pro záchodovou mísu typické.
- Díky použití v kombinaci s kbelíkem, který je k dispozici samostatně jako příslušenství, je křeslo vhodné pro odpovídající použití jako toaleta i mimo WC.
- Po vybavení pevným sedákem, který je k dispozici samostatně jako příslušenství, lze toaletu používat jako židli do sprchy.

Nohy jsou výškově nastavitelné, takže si uživatel může zvolit konkrétní délku podle svých potřeb. Nohy lze také konfigurovat tak, že přední jsou kratší než zadní. To podporuje zdravější držení těla a redukuje ohýbání kolena a kyčlí. Křeslo je opatřeno protiskluzovými krytkami a vzhledem ke své pružnosti udržuje stabilitu i na hrbolatih podlahách, které jsou typické pro mnoho sprchových vaniček. Verze s opěradlem a/nebo područkami poskytují větší bezpečnost a pohodlí. Toaletu lze díky její snížené hmotnosti snadno přemísťovat. Křeslo lze doplnit měkkým sedákem a měkkým polštářem pro opěradlo, aby bylo používání pohodlnější. Měkké sedáky, područky, opěradla a kbelíky jsou k dostání samostatně jako příslušenství.

INDIKACE A KONTRAINDIKACE:

Výrobky řady Toaletní křesla KING jsou určeny starším lidem, vozíčkářům, lidem se sníženou pohyblivostí bederní, kolenní nebo kyčelní oblasti a všem, kteří mají potíže s udržení polohy ve stoje během sprchování při každodenní osobní hygieně nebo potřebují větší stabilitu při používání WC. Od uživatele se vyžaduje samostatnost při udržování rovnováhy během sezení a stání a také přiměřená schopnost udržet se vsedě. Sedátko do sprchy se nesmí používat, pokud má uživatel problémy s rovnováhou nebo poruchy vnímání.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY:

- Maximální hmotnost uživatele uvedená v návodu k montáži nesmí být překročena.
- Před každým použitím se ujistěte, že je sedátko do sprchy správně sestaveno ve stabilní poloze.
- Sedátko do sprchy lze používat pouze na povrchu bez překážek.
- Při montáži striktně dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
- Před umístěním toaletního křesla na WC zkontrolujte, zda jsou podpěry kbelíku v zavřené poloze.
- Během montáže se může zvýšit riziko poranění prstů.
- Nehoupejte se na sedátko do sprchy, mohlo by dojít k uklouznutí, převrácení nebo podjetí nohou. Sprchové sedátko vždy postavte na 4 nohy.
- Sedátko do sprchy a jeho součásti nijak neupravujte.
- Nepoužívejte sedátko do sprchy, pokud je poškozené nebo jakkoli modifikované.
- Po použití je třeba sedátko ze sprchové vaničky vyjmout, aby nepřekáželo.
- Nepoužívejte sedátko do sprchy k jiným účelům, než pro které je určeno.
- Sedátko do sprchy nesmí být skladováno venku.

INFORMACE O ÚDRŽBĚ:

Údržba výrobku spočívá v čištění a sanitaci. Aby bylo zaručeno bezpečné používání a odpovídající hygienický standard, měl by uživatel před každým použitím provést tyto kroky. Uživatel se musí ujistit o konstrukční celistvosti zařízení a jeho součástí a musí zkontrolovat těsnost šroubů. Při čištění a sanitaci postupujte podle následujících pokynů:

1. Používejte rukavice.
2. Před zahájením co nejdůkladnější dezinfekce odstraňte viditelné nečistoty.
3. K čištění používejte vodu nebo neagresivní čisticí prostředky.
4. Otřete je suchým a čistým hadříkem.

Případně lze výrobek čistit v domácích myčkách nádobí při maximální teplotě. Měkký sedák se musí čistit výhradně ručně.

POŽADAVKY NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ:

Výrobek je vhodný pro opakované použití jinými uživateli. Před dalším použitím musí být výrobek řádně vyčištěn a vydezinfikován. Před předáním výrobku jiným osobám musí být výrobek zkontrolován kvalifikovanými prodejci.

SPRÁVNÝ POSTUP LIKVIDACE:

Výrobek nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Informujte se předem na místním úřadě o správném a ekologickém způsobu likvidace.


HLÁŠENÍ INCIDENTŮ:

Dojde-li u tohoto zařízení k závažnému incidentu, kontaktujte výrobce tohoto výrobku na adrese [info@kingbathrooms.com](mailto:info@kingbathrooms.com) a příslušný úřad ve vaší zemi.


| KÓD POLOŽKY             | POPIS                                                           | STRANA       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>KING-CMD-KN</b>      | Toaletní křeslo King                                            | <b>44-45</b> |
| <b>KING-CMDA-KN</b>     | Toaletní křeslo s područkami King                               | <b>44-45</b> |
| <b>KING-CMDB-KN</b>     | Toaletní křeslo s opěradlem King                                | <b>46</b>    |
| <b>KING-CMDBA-KN</b>    | Toaletní křeslo s područkami a opěradlem King                   | <b>47</b>    |
| <b>KING-BRI-KN</b>      | Opěradlo plus pro sedadla, židle a komody King                  | <b>48</b>    |
| <b>KING-A-KN</b>        | Područky pro sedátko a židli do sprchy King                     | <b>49</b>    |
| <b>KING-BCMD-KN</b>     | Černé toaletní křeslo King                                      | <b>44-45</b> |
| <b>KING-BCMDA-KN</b>    | Černé toaletní křeslo s područkami King                         | <b>44-45</b> |
| <b>KING-BCMDB-KN</b>    | Černé toaletní křeslo s opěradlem King                          | <b>46</b>    |
| <b>KING-BCMDBA-KN</b>   | Černé toaletní křeslo s područkami a opěradlem King             | <b>47</b>    |
| <b>KING-BBRI-KN</b>     | Černé opěradlo plus pro sedadla, židle a komody King            | <b>48</b>    |
| <b>KING-BA-KN</b>       | Černé područky pro sedátko a židli do sprchy King               | <b>49</b>    |
| <b>KING-BC-KN</b>       | Kbelík a víko pro toaletní křeslo King                          | <b>50</b>    |
| <b>KING-CCMDH2/4-KN</b> | Měkký sedák s otvory pro toaletní křeslo světle modrý/šedý King | <b>50</b>    |
| <b>KING-CCMD4-KN</b>    | Měkký polštář pro toaletní křeslo světle šedý King              | <b>51</b>    |
| <b>KING-CBR2/4-KN</b>   | Měkký sedák na opěradlo světle modrý/šedý King                  | <b>51</b>    |

| IKONY                                                                                 | POPIS                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Vyrobena v Itálii                    |
|  | Nástroje Montáž zdarma               |
|  | Vhodné do myčky                      |
|  | Maximální hmotnost uživatele         |
|  | 2 roky záruka                        |
|  | Naskenujte QR KÓD pro montážní video |

KING-CMD-KN  
KING-BCMD-KN

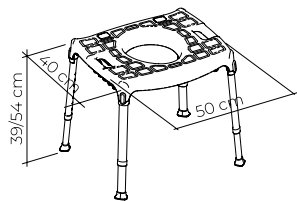


1

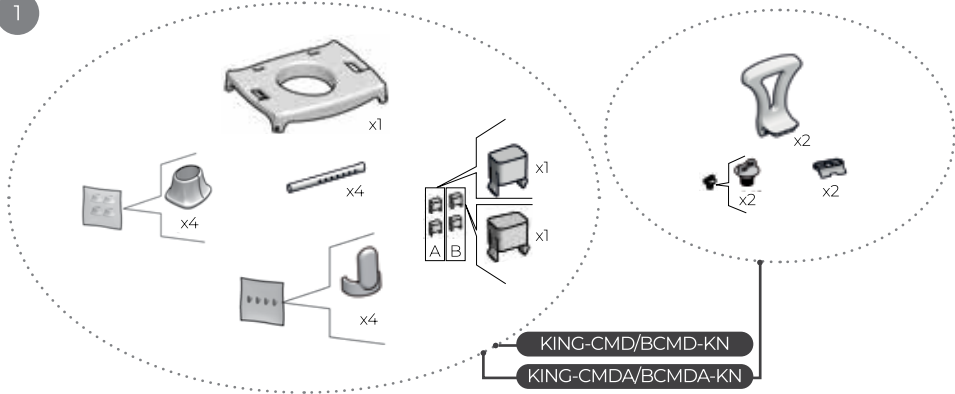


2

KING-CMD-KN  
KING-BCMD-KN

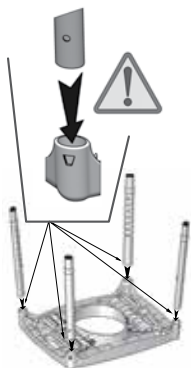

3

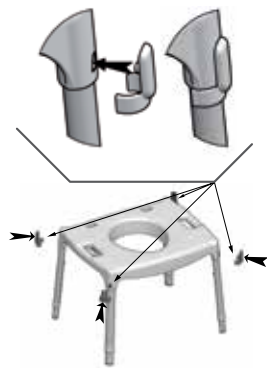


4




150 kg  
330 lb

CE MD


KING-CMDA-KN  
KING-BCMDA-KN

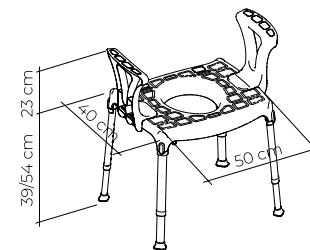

5

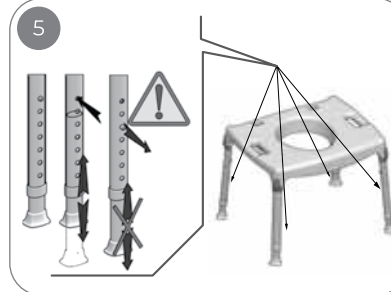

6

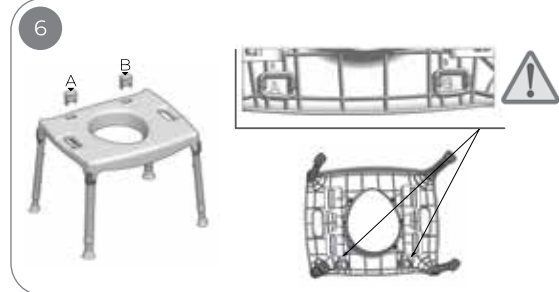


7


KING-CMDA-KN  
KING-BCMDA-KN




8

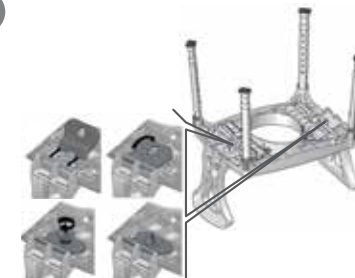

KING-CMDB-KN  
KING-BCMDB-KN

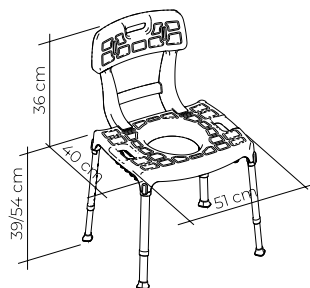

1

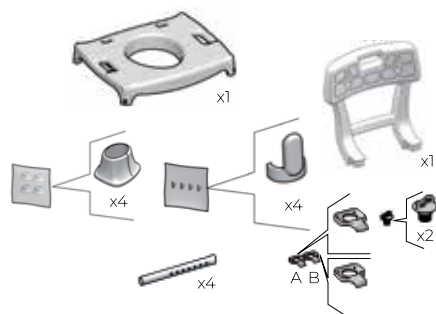

2



P. 44



3



4



5




150 kg  
330 lb




CE MD

KING-CMDBA-KN  
KING-BCMDBA-KN

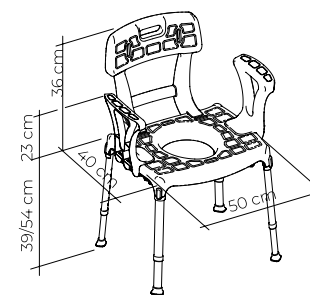

1

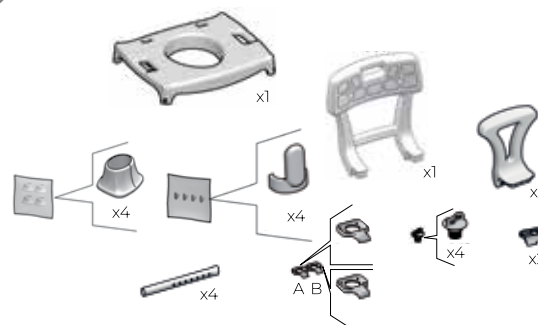

2



P. 45



3



4



5




150 kg  
330 lb




CE MD

KING-BRI-KN  
KING-BBRI-KN

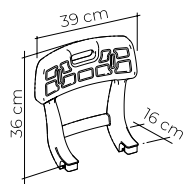


1

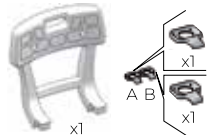

2



3

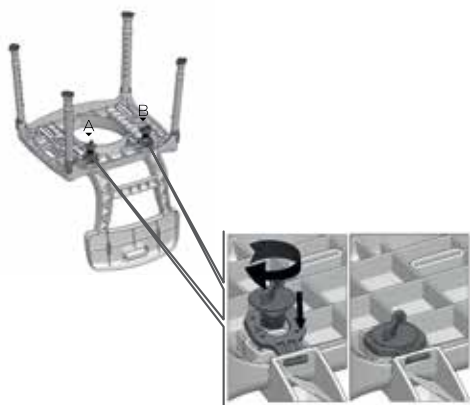


4



CE MD

KING-A-KN  
KING-BA-KN

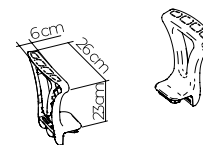


1



2



3

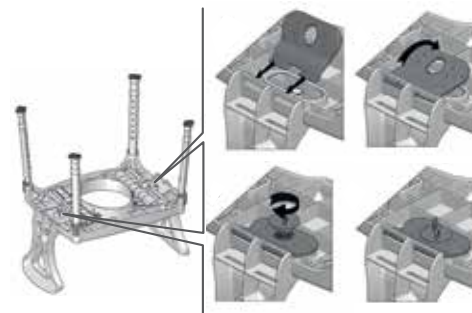

4




CE MD


KING-BC-KN



KING-CCMDH2-KN  
KING-CCMDH4-KN

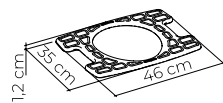

KING-CCMD4-KN

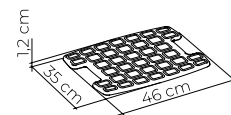

KING-CBR2-KN  
KING-CBR4-KN




1



2



3

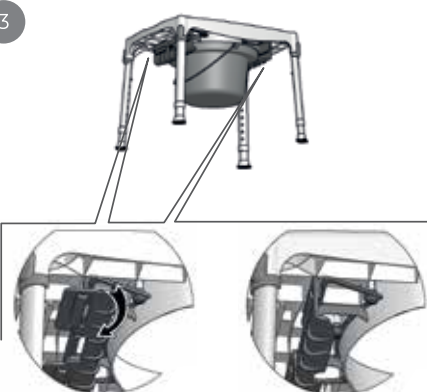

4



1



3



3



MADE IN P.R.C.

1



3



3



MADE IN P.R.C.

1



2



3



3



4



MADE IN P.R.C.

