

NÁVOD K OBSLUZE

Lavice s opěradlem pro vstup do vany Kód produktu: BathTim



1. Provedení

Lavice do vany se širokým sedákem a opěradlem je vyrobena z odolného PVC a má 14 stupňové nastavení výšky. Přídavná boční rukojeť usnadňuje používání zařízení a speciálně navržené gumové přísavky a protiskluzové krytky účinně zabraňují uklouznutí na mokrému povrchu a zajišťují lepší stabilitu při používání lavice.

Sada obsahuje: opěradlo, sedák a nožičky z PVC s přísavkami - 2 kusy, nohy s protiskluzovými krytkami - 2 kusy, montážní trubky - 2 kusy, boční nosný rám.



- 1 pvc opěradlo s možností změny strany
- 2 sedák pvc s odtokovými otvory
- 3 boční rukojeť
- 4 nastavení výšky
- 5 nohy s gumovými přísavkami
- 6 protiskluzové krytky

2. Použití


Lavice do vany je pomůcka, která uživateli usnadňuje provádění hygienických úkonů. Doporučuje se pro osoby se sníženou mobilitou,

kteřá znemožňuje nebo ztěžuje samostatné provádění činností denního života. Lavice se doporučuje pro použití ve sprchách, vanách, koupelnách a jiných vlhkých prostorách v domácnostech i nemocnicích.

3. Montáž

Krok 1. Položte sedák lavici na plochu na zem. Poté zasuněte nožičky do montážních otvorů, dokud nezapadnou zajišťovací kolíky.

- Nožičky s přísavkami by měly být na stejné straně jako boční rukojeť (foto 1).

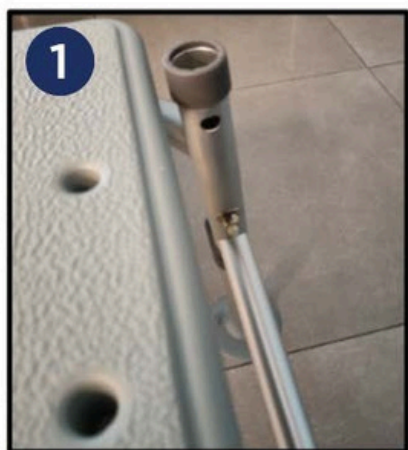

Krok 2. Namontujte montážní trubky do otvorů v opěradle (foto 2). Ujistěte se, že jsou oba zajišťovací kolíky v otvorech na opěradle. Otočte rám sedadla nohama na stranu. Poté opěradlo provlečte speciálními podložkami na zadní straně sedadla, dokud nezapadne zajišťovací kolík (foto 3).

- Opěradlo má dvoustupňové nastavení délky (foto 3). Chcete-li nastavit délku mezi opěradlem a sedákem, zatlačte na zajišťovací kolík a nastavte délku tak, aby vyhovovala uživateli.

Krok 3. Postavte lavici na nohy a nasadte boční rukojeť do příslušných otvorů sedadla lavice (foto 1). Zajistěte rukojeť pojistnými kolíky.

NASTAVENÍ VÝŠKY

~~Chcete-li~~ Chcete-li nastavit výšku lavici, zatlačte aretační kolík, požadovanou výšku nohou a následně polohu zajistěte pomocí kolíku. Nohy jsou nastavitelné v krocích po 1 cm. Všechny nohy musí být nastaveny ve stejné úrovni.

4. Technické parametry

Rozměry sedáku	67 x 41 cm
Nastavitelná výška	49,5-66 cm
Hmotnost	4,70 kg
Maximální zatížení	136 kg

5. Připomínky a doporučení

Společnost Timago International Group neodpovídá za nesprávné použití výrobku, nedodržení bezpečnostních pravidel nebo použití k jinému než určenému účelu.

6. Údržba

- Lavici je třeba pravidelně čistit vodou, houbičkou a jemnými čistícími prostředky na plasty např. mýdlem. Po každém použití otřete stoličku do sucha.
- K čištění nepoužívejte silné čistící prostředky, abrazivní prostředky, bělidla, benzín ani žádná rozpouštědla. (hrozí poškození rámu, viditelné vady a následná ztráta záručních práv).
- Doporučuje se pravidelná kontrola pryžové krytky, zajišťovacích kolíků, montážních trubek, opěradla a sedáku.

7. Podmínky skladování a přepravy

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, vodě ani vlhkosti.

8. Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou popsány v záručním listu. Doklad o nákupu (účtenka nebo faktura) musí být uchován pro účely záruky.

9. Popis

	Referenční číslo		Výrobce
---	------------------	---	---------

	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem k použití
	Výrobce posoudil shodu se základními požadavky na zdravotnické prostředky.		

Celý sortiment je k dispozici u našich distributorů.

Více informací najdete na **www.timago.com**.

Děkujeme, že jste si vybrali Timago!