

NÁVOD K OBSLUZE

Invalidní vozík hliníkový s funkcí WC/sprcha

Kód produktu: COMPLEX-TIM



1. Provedení

Vozík je vyroben z práškově lakovaného hliníkového rámu. Má sklopné loketní opěrky, které usnadňují nastupování a vystupování osobám se sníženou pohyblivostí. Je vybaven klínovým sedadlem z PU, 5" předními otočnými koly s brzdami, 24" zadními pevnými koly s parkovacími brzdami, sklopnými a odnímatelnými opěrkami nohou, bezpečnostními popruhy, madlem pro obsluhu a hygienickým košem. Konstrukce vozíku umožňuje jeho nasazení na běžnou toaletní mísu.

Sada obsahuje: rám vozíku s koly, sedadlo s klínem, montážní knoflíky, opěrky nohou s bezpečnostními popruhy, sanitární nádobu s víkem.

Součásti vozíku:




- 1 madlo
- 2 opěradlo
- 3 západka opěrky nohou
- 4 sedadlo
- 5 hygienický koš
- 6 24" zadní kola
- 7 loketní opěrky
- 8 desky opěrek nohou
- 9 5" přední kola z brzdou
- 10 parkovací brzdy

2. Použití

Invalidní vozík s funkcí WC/sprcha je pomůcka pro osoby se sníženou pohyblivostí, a pro osoby s poruchami a omezeními mobility. Vozík je určen pro použití v interiéru. Vozík funguje jako sprchovací, přepravní a toaletní pomůcka díky toaletní nádobě pod sedadlem a odolným proti vlhkosti rámem. Jejím cílem je usnadnit uživateli hygienické a fyziologické činnosti. Vozík doporučujeme zejména pro osoby s problémy s mobilitou způsobenými: paralýzou, nadváhou, degenerací nebo deformací končetin, degenerací nebo poškozením kloubů, poškozením končetin nebo jejich amputací, kardiovaskulárním onemocněním, poruchami krevního oběhu.

3. Montáž a použití

1. Abyste zabránili pohybu rámu během montáže, zajistěte vozík stisknutím brzdové páky dolů (foto 1).
2. Nasadte zadní kola vozíku do otvorů v zadní části rámu.
3. Nasadte parkovací brzdu na vyhrazenou trubku v přední části rámu a utáhněte ji šestihranným klíčem. Správně namontovaná brzda by měla být 4 cm od konce trubky (foto 2). Tento postup opakujte i na druhé straně vozíku. Zkontrolujte správnou funkci zatažením za brzdovou páku.

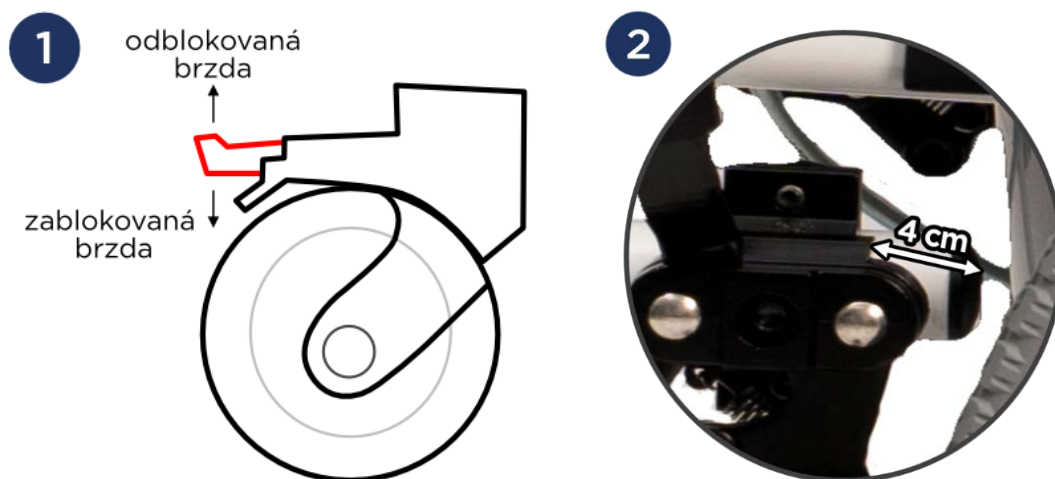

4. Odšroubujte montážní knoflíky v zadní části rámu a zasuňte trubky opěradla do otvorů v rámu invalidního vozíku. Utáhněte upevňovací knoflíky a spusťte loketní opěrky dolů.

5. Připevněte sedadlo k rámu vozíku tak, že ho zatlačíte dolů, dokud nezapadne (přední část sedadla je označena klínem).
6. Hygienický koš nasadte tak, že jej ze zadní části vozíku zasunete pod sedadlo.
7. Namontujte opěrky nohou do otvorů v přední části rámu invalidního vozíku. Vložte stupačku z vnější strany a poté ji otočte dovnitř, dokud západka opěrky nohou nezapadne na místo. Chcete-li opěrky nohou vyjmout, zvedněte západku nahoru a otočte opěrky nohou směrem ven.
8. Kolem opěrek nohou připevněte bezpečnostní popruhy pro lýtka.

PROVOZ VOZÍKU

- Před každým použitím vozíku zkontrolujte funkčnost brzd, konstrukční vlastnosti a stav kol. Pozornost je třeba věnovat také správné instalaci jednotlivých součástí a jejich správnému nastavení.
- Vozík nemá nastavitelnou šířku, před použitím se ujistěte, že šířka vozíku je pro uživatele vhodná.
- Vozík je určen pouze pro krátké vzdálenosti v interiéru. Vozík nemá tlumiče nárazů, takže jeho dlouhodobé používání není vhodné.

POZOR! Vozík nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli závady nebo nedostatky.

SKLÁPĚNÍ LOKETNÍCH OPĚREK

- Jemným pohybem zvedněte loketní opěrku nahoru.
- **Nepoužívejte** loketní opěrky rukou jako pomůcku pro vstávání. V případě potřeby by měla být přivolána osoba, která vám pomůže.

BRZDY

- Chcete-li přední kolo zablokovat, sešlápněte nohou červený brzdový pedál. Chcete-li kolo odblokovat, sešlápněte nohou černou páku uvnitř červeného pedálu.
- Chcete-li zablokovat zadní kolo, posuňte páku ruční brzdy směrem k zadní části vozíku. Chcete-li kolo odblokovat, zatáhněte za brzdovou páku v opačném směru.

OPĚRKA NOHOU



- Pro sedání a vstávání z vozíku by měly být stupačky ve svislé poloze. **Při sedání a vstávání nepoužívejte opěrky nohou jako podporu, protože hrozí riziko převrácení a pádu vozíku.**
- Opěrky nohou jsou délkově nastavitelné. Odšroubujte upevňovací šroub opěrky nohou (foto 3) a upravte nastavení. Poté šroub utáhněte.

SEDÁNÍ NA VOZÍK

- Při sedání a vstávání, změně polohy uživatele a zastavování je nutné zablokovat brzdy.
- Vozík by měl být umístěn co nejblíže prostoru pro přesun tak, aby byl v kontaktu s lůžkem nebo jiným používaným sedadlem. Pokud uživatel není schopen samostatného přesunu, měl by být přesunut na vozík.
- Ve vozíku se posaďte co nejhlouběji doprostřed sedadla, abyste zabránili nestabilitě výrobku.

4. Technické parametry

Celková šířka	63,5 cm
Vnitřní šířka	45 cm
Celková hloubka	102 cm
Výška sedadla od podlahy	53 cm

Celková výška	93 cm
Rozměry sedáku	44 x 42 cm
Hmotnost	17 kg
Maximální zatížení	150 kg
Barva rámu	bílá

5. Připomínky a doporučení

Společnost Timago International Group neodpovídá za nesprávné použití vozíku, nedodržení bezpečnostních pravidel nebo použití k jinému než určenému účelu.

6. Údržba

Je třeba provádět pravidelnou údržbu součástí vozíku:

- Sedadlo lze čistit studenou nebo teplou vodou vlhkým (ne mokrým) hadříkem bez použití čisticích prostředků. Obtížnější skvrny je třeba čistit houbou.
- Plastové díly by se měly čistit vlhkým hadříkem, případně čisticím prostředkem na plasty. Při používání mycích prostředků přitom dodržujte pokyny výrobce a bezpečnostní pravidla.
- Po každém použití je třeba toaletní nádobu a sedátko vyprázdnit a vydezinfikovat. Používejte čisticí prostředky na toalety podle doporučení jejich výrobce.

7. Podmínky skladování a přepravy

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.

8. Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou popsány v záručním listu. Doklad o nákupu (účtenka nebo faktura) musí být uchován pro účely záruky.

9. Popis

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem k použití
	Výrobce posoudil shodu se základními požadavky na zdravotnické prostředky.		

Celý sortiment je k dispozici u našich distributorů. Více informací najdete na **www.timago.com**

Děkujeme, že jste si vybrali Timago!