

NÁVOD K OBSLUZE

Invalidní vozík hliníkový

Kód produktu: ACTIV-TIM



1. Provedení

Vozík je vyroben z lehkého ocelového rámu. Má tvarované, sklopné loketní opěrky a volitelné čalounění (opěradlo a sedák) z prodyšných materiálů (mesh/síťovina). Invalidní vozík je vybaven funkcí rychlé demontáže kola, nastavením těžiště, brzdami pro doprovod a sklopnou opěrkou zad. Má bezpečnostní pásy, kola proti převrácení, bezpečnostní popruhy, zadní kola o průměru 22" a přední kola o průměru 8". K dispozici také ve verzích s 16" a 24" koly.

Sada obsahuje: rám vozíku s koly, sedadlo a opěradlo, popruh pro uživatele, sadu klíčů.

Volitelné doplňky: kolečka proti překlopení, opěrky nohou s bezpečnostními popruhy, čalounění ze síťoviny (mesh).

Součásti vozíku:



2. Použití

Invalidní hliníkový vozík je pomůcka pro osoby sníženou pohyblivostí, a pro osoby s poruchami a omezeními mobility. Je poháněn svalovou silou rukou uživatele nebo doprovodem. Lze jej používat tak v interiéru, jak i exteriéru.

3. Montáž

Krok 1. Rozložení vozíku

Vozík by měl být umístěn na zemi. Pomocí loketních opěrek vozík rozložíte. Poté stisknete sedák uprostřed tak, aby všechny části vozíku do sebe zapadly.

Krok 2. Opěradlo a sedadlo

Opěradlo by mělo být zvednuto a zajištěno pojistnými kolíky umístěnými pod rukojetí pro doprovod. Poté je třeba namontovat čalounění opěradla a sedadla.

Krok 3. Opěrky nohou

Nasaďte opěrky nohou na vnější stranu rámu invalidního vozíku a poté otočte opěrku nohou dovnitř, dokud nezapadne na místo.

Krok 4. Loketní opěrky

Loketní opěrky mají možnost sklápění. Chcete-li zvednout loketní opěrku, stisknete tlačítko umístěné na rámu vozíku (pod opěrkami).

Krok 5. Nastavení výšky opěrky nohou

Opěrky nohou nastavíte vyšroubováním šroubu na trubce opěrky nohou. Mezi stupačkami a zemí ponechte dostatečnou vzdálenost, protože příliš nízké stupačky mohou vozíku způsobit potíže při překonávání kopců a obrubníků. Opěrky nohou by měly být nastaveny tak, aby úhel mezi trupem a stehny byl přibližně 90° (optimální poloha pro uživatele při sezení).

Krok 6. Bezpečnostní popruhy

Připevněte k rámu bezpečnostní popruhy, abyste zabránili sklouznutí nohou uživatele ze stupaček.

SESTAVENÍ INVALIDNÍHO VOZÍKU

Vozík lze pro snadnější přepravu nebo skladování opět složit. Před montáží rámu vozíku:

- Vyklopte opěrky nohou a nastavte je do vzpřímené polohy.
- Odstraňte čalounění.
- Pomocí rukojetí zvedněte sedadlo nahoru, dokud se rám vozíku nesloží.
- Chcete-li sklopit opěradlo, stisknete současně zajišťovací prvky pod rukojetí na zadní straně vozíku a stáhněte opěradlo dolů.

FUNKCE PARKOVACÍ BRZDY

Chcete-li kola zablokovat, posuňte brzdovou páku dopředu, dokud není kolo zcela zablokováno (zvláště pro levé a pravé kolo). Upozorňujeme, že parkovací brzda slouží pouze k zablokování kol při stání.

SEŘÍZENÍ PARKOVACÍ BRZDY

Správná funkce parkovací brzdy závisí na jejím seřízení a nastavení. Dřík brzdy by měl být nastaven tak, aby brzdová noha bezpečně zablokovala kolo a aby páka nekladla nadměrný odpor.

- Při nadměrném odporu je třeba dřík posunout dopředu pomocí zajišťovacích šroubů. Nastavte brzdu do takové polohy, aby kolo snadno a bez odporu zablokovala.
- Pokud se brzda plně nedotýká kola a dostatečně ho neblokuje, postupujte podle výše uvedených pokynů a posuňte dřík opačným směrem.

FUNKCE POMOCNÉ BRZDY (PRO DOPROVOD)

- Brzdové páky jsou umístěny za opěradlem u rukojetí na obou stranách vozíku.
- Stisknutím brzdové páky zabrzdíte a povolením uvolníte. Úkon by měl být proveden plynule a správnou silou.
- Brzdy jsou vybaveny parkovacím zámkem. Uchopte rukojeť brzdy, stiskněte ji a zatáhněte za zajišťovací prvek (umístěný pod rukojetí brzdy).

4. Činnosti před každým použitím

Krok 1. Kontrola stavu vozíku

Je třeba zkontrolovat stav brzd, konstrukce a pneumatik a věnovat pozornost správnosti namontovaných součástí a jejich správnému seřízení.

Pozor! Vozík nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli závady nebo nedostatky.

Krok 2. Zatažení parkovací brzdy

Při nastupování a vystupování z vozíku zatáhněte parkovací brzdy.

Krok 3. Umístění opěrek nohou

Pro sedání a vstávání z vozíku by měly být stupačky ve svislé poloze. Při nastupování a vystupování z invalidního vozíku nepoužívejte opěrku nohou jako oporu protože hrozí nebezpečí převrácení vozíku a pádu. Po usazení do invalidního vozíku rozložte stupačky.

Pozor! Nestůjte na opěrkách nohou, protože hrozí jejich poškození.

Krok 4. Sedání na vozík

Vozík by měl být umístěn co nejblíže nástupnímu prostoru pacienta. Vozík by se měl dotýkat lůžka nebo jiného používaného sedadla. Pokud uživatel není schopen samostatného přesunu, měl by být přesunut na vozík.

Krok 5. Vhodná poloha uživatele

Na vozíku by se mělo sedět ve vzpřímené poloze s koleny pokrčenými v úhlu 90 stupňů.

Vozík je připraven k použití.

5. Technické parametry

Velikost sedadla	43 / 46 / 48 cm
Celková šířka	61 / 64 / 66 cm
Celková hloubka	109 cm
Celková výška	92 cm
Výška sedadla od podlahy	50 cm
Hmotnost vozíku s koly	10,64 - 11,18 kg
Maximální zatížení	115 kg
Rozměry po složení	106 x 29 x 92 cm

6. Připomínky a doporučení

Společnost Timago International Group neodpovídá za nesprávné použití vozíku, nedodržení bezpečnostních pravidel nebo použití k jinému než určenému účelu.

7. Údržba

Je třeba provádět pravidelnou údržbu součástí vozíku:

- Čalounění a polštář lze čistit studenou nebo teplou vodou vlhkým (ne mokrým) hadříkem bez použití čisticích prostředků. Obtížnější skvrny je třeba čistit houbou. Při údržbě čalounění je třeba dbát na to, aby nedošlo k jeho nadměrnému namočení. Sušte mimo dosah zdrojů tepla.
- Plastové díly by se měly čistit vlhkým hadříkem, případně čisticím prostředkem na plasty. Při používání mycích prostředků přitom dodržujte pokyny výrobce a bezpečnostní pravidla.

8. Podmínky skladování a přepravy

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, vodě ani vlhkosti.

9. Záruka

Na všechny výrobky distribuované naší společností se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou popsány v záručním listu, který je dostupný na našich internetových stránkách. Prosíme, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek

zakoupili. Upozorňujeme, že doklad o koupi (účtenka nebo faktura) musí být uchován pro účely záruky.

10. Popis

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem k použití
	Výrobce posoudil shodu se základními požadavky na zdravotnické prostředky.		

Celý sortiment je k dispozici u našich distributorů.

Více informací najdete na **www.timago.com**.

Děkujeme, že jste si vybrali Timago!