

NÁVOD K POUŽITÍ

TOALETNÍ KŘESLO



TGR-R KT 023B



TGR-R KT 023C



POUŽITÍ

Toaletní křeslo je kompenzační pomůckou, které uživateli usnadňuje provádět fyziologické činnosti. Doporučuje se pro osoby, které mají problémy s nezávislým pohybem, s onemocněním pohybového aparátu a pro lidi, kteří ztratili schopnost samostatně si sednout a postavit se. Židle působí jako toaleta díky sanitární nádobě pod sedadlem. Transportní kola u modelu FS 696 umožňují po vytažení sanitární nádoby nacouvat na běžnou toaletu.

ÚVOD

Před použitím se ujistěte, že výrobek nevykazuje žádné poškození, ke kterému by mohlo dojít během přepravy (viditelné a hmatatelné poškození, např. praskliny). Pokud tomu tak je, kontaktujte prosím prodejní místo. Poškozený výrobek nepoužívejte! Upozorňujeme, že při používání poškozeného výrobku může dojít k úrazu!

Důležité je, abyste si přečetli tuto příručku, která obsahuje důležité informace.

Máte-li dotazy ohledně používání výrobku, kontaktujte nás.


Rádi bychom také zdůraznili, že pokud si nejste jistí o vhodnosti používání této pomůcky vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

POPIS

Skládací rám křesla je z lakované oceli. Nohy jsou výškově nastavitelné. Model TGR-R KT 023B má nohy opatřené protiskluzovými násadci, TGR-R KT 023C je doplněn čtyřmi koly v otočných vidlicích s brzdami na zadních kolech. Součástí je plastová sanitární nádoba s víkem, která je snadno vyjímatelná a záchodové prkénko s víkem. Plastové boční područky zabezpečují stabilitu a bezpečnost použití.

SOUČÁSTI

- Loketní opěrky
- Záchodové prkénko s poklopem
- Sanitární nádoba s víkem
- Výškové nastavení – aretační pojistka
- Protiskluzové násadce
- Nožky s kolami (zadní s brzdou)

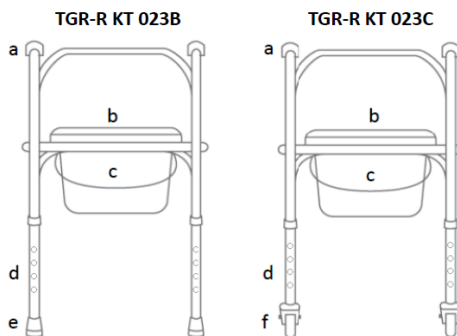

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Celková šířka: 56 cm

Vnitřní šířka: 46 cm

Celková hloubka: 47 cm

Výška sedáku od podlahy / celková výška:

TGR-R KT 023B: 46-56 cm / 73-83 cm, TGR-R KT 023C: 59-69 cm / 89-99 cm

Rozměry sedáku: 38 x 40 cm

Hmotnost: TGR-R KT 023B – 6,5 kg, TGR-R KT 023C: 8 kg

Nosnost: 120 kg

Barva: světle šedá

MONTÁŽ

Rozložení: Roztáhněte strany křesla chycením za plastové opěrky a umístěte na nich příčnou vzpěru. Prkénko s poklopem namontujte na zadní část rámu. Nasadte sanitární nádobu na rám pod prkénkem.

Složení: Demontujte prkénko a poklop, vyjměte toaletní nádobu. Odklopte přední část rámu směrem dolů, a následně odklopte jednu stranu rámu dopředu a druhou dozadu.

Než začnete používat toaletní křeslo, nastavte výšku sedadla tak, že stlačíte kovový aretační kolík na noze a vyberte vhodnou polohu vnitřní trubky. Po nastavení musí aretační zacvaknout do zvoleného otvoru. Nastavení je možné v intervalech po 2,5cm

Pozor! Všechny nohy musí být nastavené na stejnou výšku (stejný otvor). Všechny nohy musí stát pevně na podlaze.

POUŽÍVÁNÍ

Pozor! Během sedání a sesedání z křesla a během zastavení musí být brzdy zablokovány (týká se TGR-R KT 023C). Kola zabrzdíte sešlápnutím brzdy směrem dolů – odbrzdění směrem nahoru.

- Zvedněte poklop sedátka a odstraňte víko nádoby. Po použití zakryjte nádobu víkem a dejte toaletní sedátko s poklopem do vodorovné polohy.

Pozor! Toaletní nádobu vyprázdněte a důkladně vymyjte po každém použití.

PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

- **Není dovoleno** stoupat na rám křesla, poklop ani jinou část křesla.
- Není dovoleno opírat se o křeslo za jiným účelem, než je sedání a vstávání.
- Není dovoleno připevňovat anebo zavěšovat předměty na rámu nebo loketní opěrky křesla, protože to může způsobit nehodu.
- **Nepřekračujte** maximální nosnost křesla!
- V koupelně odstraňte případné překážky a zkontrolujte, zda je podklad rovný. Kluzké podklady musí být chráněny, např. protiskluzovou rohoží.
- Křeslo je určeno pro použití na rovném plochém povrchu. Není dovoleno požívat křeslo na nestabilním povrchu.
- Neprovádějte žádné opravy nebo úpravy konstrukce. Veškeré opravy musí být provedeny kvalifikovaným servisem či výrobcem.
- Pro zachování dlouhé životnosti a vlastností produktu je nutné udržovat produkt v čistotě a dodržovat skladovací podmínky. Neskladujte při minusových teplotách, velmi vysoké vlhkosti (koupelny) a ve venkovních prostorech.

VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ

Pozor! Je nutné systematicky kontrolovat stav křesla a okamžitě informovat prodejce o všech poškozeních, které vyvolávají pochybnosti o bezpečnosti používání.

Pozor! Používejte pouze originální náhradní díly od výrobce. V případě potřeby se obraťte na prodejce.

Pozor! Neprovádějte sami žádné opravy nebo konstrukční úpravy.

Pozor! Výrobce nepřijímá zodpovědnost za škody či úrazy způsobené použitím výrobků v rozporu s touto instrukcí a účelem použití, a nedodržením bezpečnostních doporučení.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

Prohlídky

Je nutné systematicky provádět nezávislou kontrolu technického stavu křesla.

Jednou za 3 měsíce: Provádějte vizuální kontrolu ohledně stability a vzhledu rámu (praskliny apod.) a stav jisticích prvků (aretační kolíky pro nastavení výšky). V případě zjištění nutnosti opravy, kontaktujte prodejce anebo dovozce.

Čištění

Rám je potřeba pravidelně čistit navlhčeným hadrem a následně důkladně osušit. Možno použít běžné čistí a konzervační prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu.

Po každém použití vyprázdněte a dezinfikujte nádobu a desku sedadla. Používejte čistící prostředky na toalety podle doporučení výrobce.

ZÁRUKA A SERVIS

Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na poškození vlivem opotřebení, způsobeného obvyklým užíváním. Záruka zaniká při jakémkoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než odborným servisem, anebo s jeho souhlasem. Záruka se nevztahuje také na vady a poškození vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k údržbě a při nesprávném používání výrobku v rozporu s touto instrukcí.

REF	Referenční číslo		Výrobce
LOT	Sériové číslo		Datum výroby
SN	Číslo skupiny	EC REP	Zástupce v Evropské Unii
	Poznámka		Prosím přečtěte si návod
CE	Označení, že výrobce provedl posouzení shody výrobku v souladu s požadavky směrnice EU pro zdravotnické prostředky.		

Datum vytvoření návodu: 18.1.2019

Výrobce: Timago International Group Sp z.o.o., Polsko