

KING ZVÝŠENÝCH ZÁCHODOVÝCH PRKÉNEK S BOČNÍM UZAMYKACÍM SYSTÉMEM

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:

Výrobky řady zvýšených záchodových prkének s bočním uzamykacím systémem KING jsou navrženy tak, aby zvyšovaly výšku záchodové mísy, usnadňovaly sezení a vstávání a podporovaly nezávislost a pohodlí. Modely s měkkým sedákem nabízejí větší pohodlí prkénka, které je měkké a komfortní. Kromě toho zvrátněný povrch sedáku zajišťuje větší tření a stabilitu. Výrobek se dodává v různých konfiguracích, s měkkým sedákem nebo bez něj a s poklopem nebo bez něj. Měkké sedáky jsou k dispozici v různých barvách. Víko, bidet a měkké sedáky jsou k dispozici také samostatně jako příslušenství.

INDIKACE A KONTRAINDIKACE:

Výrobky řady zvýšených záchodových prkének s bočním uzamykacím systémem KING jsou určeny starším lidem, vozíčkářům, lidem se sníženou pohyblivostí bederní, kolenní nebo kyčelní oblasti a všem, kteří mohou mít potíže se sezením a vstáváním z toaletní mísy. Modely s měkkým sedákem se při sezení deformují, čímž se zvětšuje opěrná plocha pro uživatele a umožňuje lepší rozložení hmotnosti. Díky tomu jsou tyto verze vhodné zejména v případech, že uživatel trpí proleženinami nebo nemocemi, které by je mohly způsobit, jako je například cukrovka. Během používání je vyžadována schopnost samostatného sezení. Používání výrobku v případech poruch vnímání nebo problémů s rovnováhou při sezení se nedoporučuje.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY:

- Maximální hmotnost uživatele uvedená v návodu k montáži nesmí být překročena.
- Před každým použitím se ujistěte, že je výrobek na WC ve stabilní poloze a že je na něm správně upevněn pomocí dodaného zajišťovacího systému.
- Ujistěte se, že měkký sedák správně obepíná sedadlo.
- Před použitím měkkého sedáku se ujistěte, že je prkénko čisté a suché.
- Při montáži striktně dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
- Výrobek a jeho součásti nijak neupravujte.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo jakkoli upravený.
- Ujistěte se, že výška výrobku je taková, aby jeho používání bylo pro uživatele snadné a bezpečné.
- Při používání se vyhněte polohám, při kterých je váha těla příliš vpředu. Nesprávná poloha může vést k nestabilitě a převrácení výrobku.
- Výrobek a příslušenství nesmí být skladovány venku.

INFORMACE O ÚDRŽBĚ:

Údržba výrobku spočívá v čištění a sanitaci. Aby bylo zaručeno bezpečné používání a odpovídající hygienický standard, měl by uživatel před každým použitím provést tyto kroky. Uživatel se musí ujistit o konstrukční celistvosti zařízení a jeho součástí a musí zkontrolovat těsnost šroubů. Při čištění a sanitaci postupujte podle následujících pokynů:

1. Používejte rukavice.
2. Před zahájením co nejdůkladnější dezinfekce odstraňte viditelné nečistoty.
3. K čištění používejte vodu nebo neagresivní čisticí prostředky.
4. Otřete je suchým a čistým hadříkem.

Případně lze výrobek čistit v domácích myčkách nádobí při maximální teplotě. Měkký sedák se musí čistit výhradně ručně.

POŽADAVKY NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ:

Výrobek je vhodný pro opakované použití jinými uživateli. Před dalším použitím musí být výrobek řádně vyčištěn a vydezinfikován. Před předáním výrobku jiným osobám musí být výrobek zkontrolován kvalifikovanými prodejci.

SPRÁVNÝ POSTUP LIKVIDACE:

Výrobek nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Informujte se předem na místním úřadě o správném a ekologickém způsobu likvidace.

HLÁŠENÍ INCIDENTŮ:


Dojde-li u tohoto zařízení k závažnému incidentu, kontaktujte výrobce tohoto výrobku na adrese info@kingbathrooms.com a příslušný úřad ve vaší zemi.

KÓD POLOŽKY	POPIS	STRANA
KING-5-KN	Zvýšené záchodové prkénko 5 cm/2 palce King	44
KING-5L-KN	Zvýšené záchodové prkénko 5 cm/2 palce s víkem King	44
KING-10-KN	Zvýšené záchodové prkénko 10 cm/4 palce King	44
KING-10L-KN	Zvýšené záchodové prkénko 10 cm/4 palce s poklopem King	44
KING-15-KN	Zvýšené záchodové prkénko 15 cm/6 palců King	44
KING-15L-KN	Zvýšené záchodové prkénko 15 cm/6 palců s víkem King	44
KING-5S02/04-KN	Měkké zvýšené záchodové prkénko 5 cm/2 palce světle modré/šedé King	45
KING-5LS02/04-KN	Měkké vyvýšené záchodové prkénko 5 cm/2 palce s poklopem světle modré/šedé King	45
KING-10S02/04-KN	Měkké vyvýšené záchodové prkénko 10 cm/4 palce světle modré/šedé King	45
KING-10LS02/04-KN	Měkké zvýšené záchodové prkénko 10 cm/4 palce s poklopem světle modré/šedé King	45
KING-15S02/04-KN	Měkké zvýšené záchodové prkénko 15 cm/6 palců světle modré/šedé King	45
KING-15LS02/04-KN	Měkké zvýšené záchodové prkénko 15 cm/6 palců s poklopem světle modré/šedé King	45
KING-L-KN	Poklop pro zvýšené záchodové prkénko 5/10/15 cm King	46
KING-LS-KN	Víko pro měkké zvýšené záchodové prkénko 5/10/15 cm King	46
KING-BDT-KN	Bidet pro zvýšené záchodové sedátko 5/5L/10/10L/15/15L King	47
KING-CRTS2/4-KN	Měkký sedák pro zvýšené záchodové prkénko světle modré/šedé King	47

IKONY	POPIS
	Vyrobeno v Itálii
	Nástroje Montáž zdarma
	Vhodné do myčky
	Maximální hmotnost uživatele
	2 roky záruka
	Naskenujte QR KÓD pro montážní video


KING-5-KN
KING-10-KN
KING-15-KN

H = 5/10/15 CM

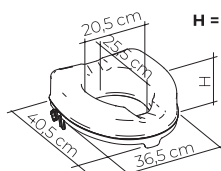

KING-5L-KN
KING-10L-KN
KING-15L-KN


H = 5/10/15 CM

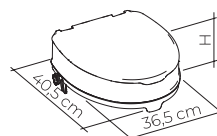

1




2

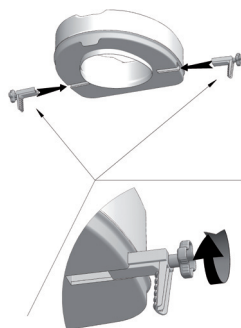

3



4

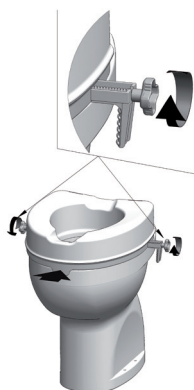

5




250 kg
550 lg




CE MD



KING-5S02/04-KN
KING-10S02/04-KN
KING-S02/04-KN

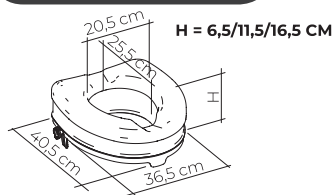


KING-5S02/04-KN
KING-10S02/04-KN
KING-S02/04-KN

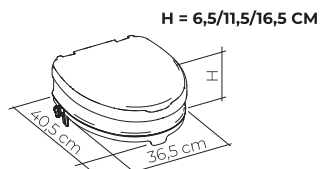

1

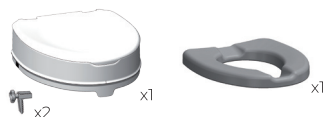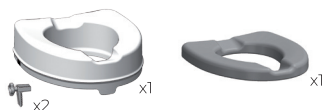

2

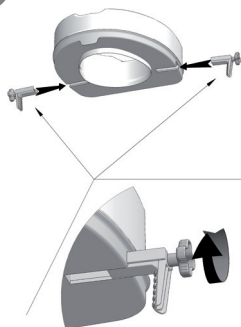

3



4



5



6



7




250 kg
550 lg



CE MD

KING-L-KN
KING-LS-KN

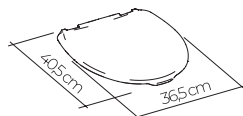

1




KING-L-KN




KING-LS-KN

2

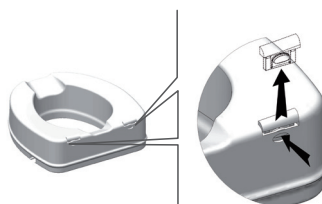


3

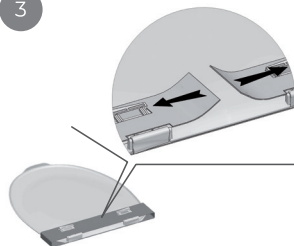


KING-L-KN

4

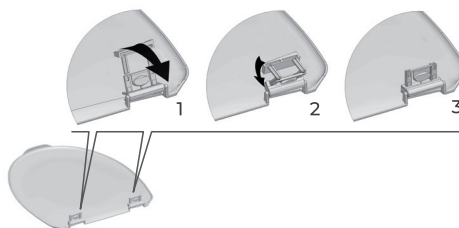


KING-LS-KN

5

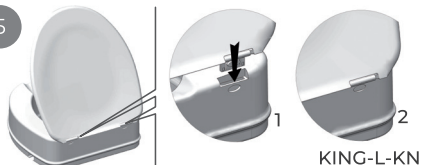

KING-L-KN

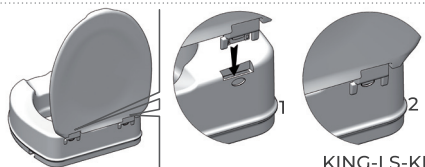

KING-LS-KN

6




KING-L-KN



KING-LS-KN



KING-BDT-KN

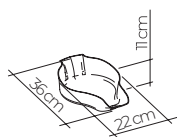

1



2




3



CE MD

KING-CRTS02-KN KING-CRTS04-KN

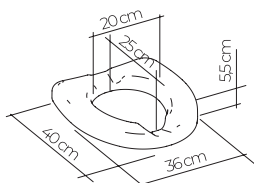

1



2



3



CE MD

MADE IN P.R.C.