

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:

Výrobky řady *Sedátka do vany KING* slouží jako lavička určená k tomu, aby se zabránilo používání dna vany, a usnadňují vstup a výstup z vany. Snižují riziko zaujímání únavných nebo nebezpečných poloh během sezení a stání. Sedátko do vany podporuje samostatnost uživatele při každodenní osobní hygieně ve vaně. Opěradlo dále zvyšuje pohodlí a nabízí přístupnější a bezpečnější způsob koupání. Sedátko lze doplnit měkkým sedákem, aby bylo používání pohodlnější. Měkké sedáky jsou k dispozici samostatně jako příslušenství.

INDIKACE A KONTRAINDIKACE:

Výrobky řady sedátek do vany KING jsou určeny pro starší osoby, osoby na invalidním vozíku, osoby se sníženou pohyblivostí dolních končetin, beder a kyčlí a pro všechny, kteří mají potíže s leháním a vstáváním ve vaně. Pro používání sedátka ve vaně je nutná schopnost samostatného sezení. Pokud má uživatel problémy s rovnováhou nebo vnímáním, nedoporučuje se sedátko do vany používat.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY:

- Maximální hmotnost uživatele uvedená v návodu k montáži nesmí být překročena.
- Pokud má uživatel problémy s pohybem nebo trpí poruchami rovnováhy, doporučujeme požádat o pomoc při vstupu do vany a výstupu z ní.
- Před každým použitím musí uživatel zkontrolovat neporušenost sedátka vany.
- Při montáži striktně dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
- Riziko poranění prstů může vzrůst v etapě výběru šířky ve fázích montáže a při instalaci na vanu.
- Před každým použitím se ujistěte, že je sedátko pevně usazeno na vaně. Koncové pryžové krytky a obdélníkové pryžové lišty na hliníkových podpěrách musí být správně opřeny o rovnou hranu, resp. o bok vany.
- Sedátko do vany a jeho součásti nijak neupravujte.
- Nepoužívejte sedátko do vany, pokud je poškozené nebo jakkoli upravené.
- Při používání se vyhněte polohám, při kterých je váha těla příliš posunuta dozadu nebo dopředu. Nesprávná poloha může vést k nestabilitě a převrácení sedátka do vany.
- Ve fázích sezení a stání se může zvýšit riziko uklouznutí kvůli mokré podlaze.
- Sedátko do vany nesmí být skladováno venku.

INFORMACE O ÚDRŽBĚ:

Údržba výrobku spočívá v čištění a sanitaci. Aby bylo zaručeno bezpečné používání a odpovídající hygienický standard, měl by uživatel před každým použitím provést tyto kroky. Uživatel se musí ujistit o konstrukční celistvosti zařízení a jeho součástí a musí zkontrolovat těsnost šroubů. Při čištění a sanitaci postupujte podle následujících pokynů:

1. Používejte rukavice.
2. Před zahájením co nejdůkladnější dezinfekce odstraňte viditelné nečistoty.
3. K čištění používejte vodu nebo neagresivní čisticí prostředky.
4. Otřete je suchým a čistým hadříkem.

Případně lze výrobek čistit v domácích myčkách nádobí při maximální teplotě. Měkký polštář se musí čistit výhradně ručně.

POŽADAVKY NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ:

Výrobek je vhodný pro opakované použití jinými uživateli. Před dalším použitím musí být výrobek řádně vyčištěn a vydezinfikován. Před předáním výrobku jiným osobám musí být výrobek zkontrolován kvalifikovanými prodejci.

SPRÁVNÝ POSTUP LIKVIDACE:

Výrobek nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Informujte se předem na místním úřadě o správném a ekologickém způsobu likvidace.


HLÁŠENÍ INCIDENTŮ:

Dojde-li u tohoto zařízení k závažnému incidentu, kontaktujte výrobce tohoto výrobku na adrese info@kingbathrooms.com a příslušný úřad ve vaší zemi.


KÓD POLOŽKY	POPIS	STRANA
KING-BS-KN	Sedátko do vany King	44
KING-BSB-KN	Sedátko do vany s opěradlem King	44
KING-BBS-KN	Černé sedátko do vany King	45
KING-BBSB-KN	Černé sedátko do vany s opěradlem King	45
KING-BR-KN	Opěradlo pro sedátko do vany King	46
KING-BBR-KN	Černé opěradlo pro sedátko do vany King	46
KING-CBS2/4-KN	Měkký sedák na sedátko do vany světle modrý/šedý King	47

IKONY	POPIS
	Vyrobena v Itálii
	Nástroje Montáž zdarma
	Vhodné do myčky
	Maximální hmotnost uživatele
	2 roky záruka
	Naskenujte QR KÓD pro montážní video


KING-BS-KN
KING-BBS-KN

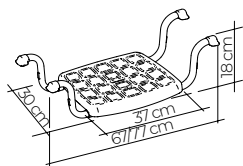


1

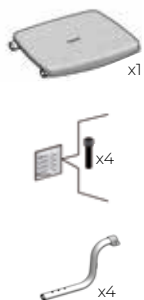

2

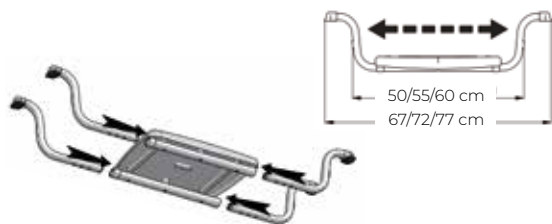


3

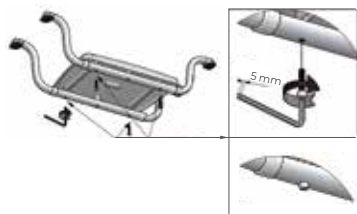


4



KING-BSB-KN
KING-BBSB-KN

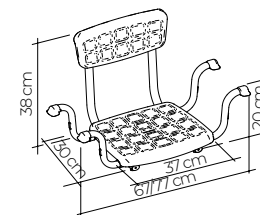


1

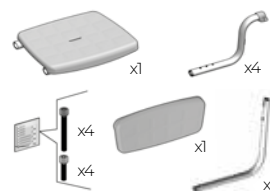


2



3

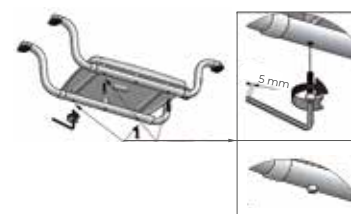

4

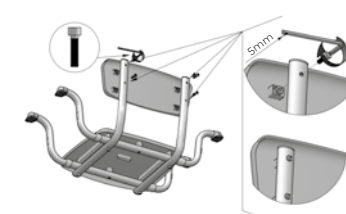

5



120 kg
265 lb



CE MD




120 kg
265 lb




CE MD


KING-BR-KN
KING-BBR-KN

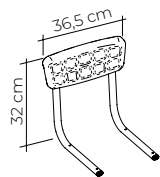


1

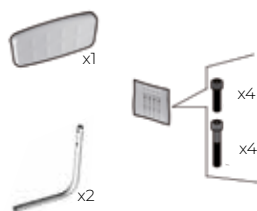

2

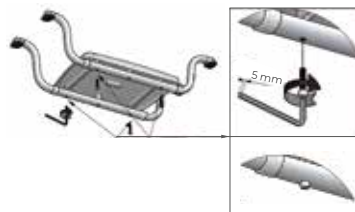


3

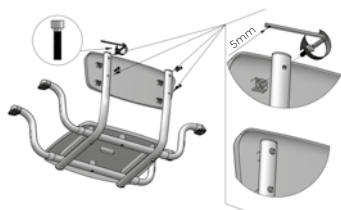

4



KING-CBS2/4-KN

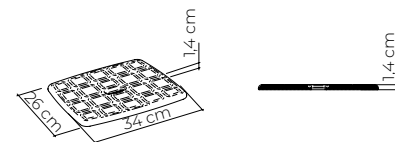


1



2



3

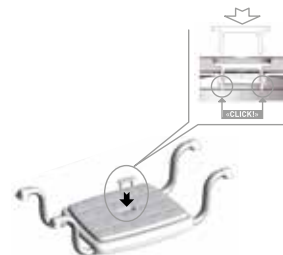

4



120 kg
265 lb



CE MD



120 kg
265 lb



CE MD
MADE IN P.R.C.