

Čtyřkolové ocelové chodítko


Kód výrobku TGR-R RS 880

1.Provedení

Skládací, čtyřkolové chodítko je vyrobeno z ocelového rámu s povrchovou úpravou komaxit. Je vybaveno čalouněným sedátkem, měkkou opěrkou a snímatelným košíkem. Další výbavou jsou výškově stavitelné ručky ukončené anatomicky tvarovanými madly a také brzdy s možností zablokování v zaparkované poloze. Chodítko je vybaveno úzkými koly průměru 8 ".

Sada obsahuje:

- Dvě madla s brzdami
- Rám chodítka se sedátkem
- Opěradlo
- Košík
- Aretační šrouby – 2 ks

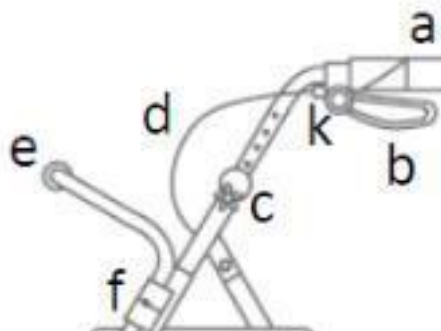

Prvky chodítka:

- a. madlo
- b. brzda
- c. aretační šroub
- d. bovdeny brzd
- e. opěradlo
- f. aretační čep
- g. příčný profil
- h. závěs příčného profilu
- i. pás pro složení rámu
- j. košík
- k. možnost nastavení brzdy nahoře
- l. možnost nastavení brzdy dole

2. Použití

Čtyřkolové chodítko je pomocné vybavení, které je určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí, které během chůze

potřebují stabilní podporu a jištění. Je doporučována také starším osobám, jako pomoc při udržování rovnováhy, zlepšení pohodlí během pohybu a jako ochranný prostředek proti pádu. Použití chodítka pozitivně ovlivňuje návrat k aktivitě osobám, které mají problémy s pohybem a udržením svislé polohy. Zaručuje lepší stabilitu, podporu a bezpečnost během chůze.

3. Montáž

Rozložení a složení chodítka

- Pokud chcete chodítko rozložit, zatlačte na příčný profil, který se nachází pod sedátkem, až do okamžiku, kdy budou závěsy úplně rozevřené. Následně zasuňte ručky s madly do montážních otvorů a zašroubujte aretační šroub ve správné výšce, bovdeny brzd musí být na vnější straně chodítka. Sedátko opřete o rozložený rám.
- Dále namontujte opěradlo, osadte jej v montážních otvorech v přední části chodítka do okamžiku zablokování aretačních čepů.
- Košík lze zavěsit na rámu v přední části chodítka.
- Z kol sundejte plastové chrániče.
- Pokud chcete chodítko kvůli přepravě složit, sundejte košík, sklopte sedátko a zatáhněte pás pro složení rámu směrem nahoru, až do okamžiku celkového složení rámu.

Používání brzd

Pozor! Bez ohledu na zdravotní stav uživatele může být během prvního použití podpory nutná pomoc třetí osoby.

- Pro zabrzdění chodítka zatáhněte páku brzdy směrem nahoru k madlu a podržet ji v této poloze.
- Při zastavení nebo během používání sedátka zablokujte brzdy v parkovací poloze, a to tak, že zatlačíte páku brzdy směrem dolů.
- Pro odblokování brzdy z parkovací polohy zatáhněte páku brzdy směrem nahoru.

Nastavení výšky ruček

Výšku ruček nastavte na takové úrovni, aby mohl být uživatel během používání chodítka vyrovnaný natolik, nakolik mu to umožňuje jeho zdravotní stav, s rameny v klidové poloze a s lehce pokrčenými lokty. Nedoporučujeme opírat se o chodítko celou váhou těla.

- Pro nastavení výšky ruček odšroubujte aretační šroub, který se nachází na vnější straně rámu, zvolte správnou výšku ručky a zašroubujte aretační šroub zpět na jeho místo.

Pozor! Obě ručky nastavte na stejnou výšku.

Seřízení brzd

Pozor! Před prvním použitím doporučujeme zkontrolovat stav brzd. Pokud nemají obě brzdy stejný brzdový účinek, seřídte je.

Nastavení brzdy nahoře

- Povolte uchycení bovdeny, přitáhněte lanko na požadovanou délku a následně jej zablokujte dotažením přítláčného šroubu.

Nastavení brzdy dole

- Pomocí plochého klíče povolte montážní šroub, přitáhněte černé lanko brzdy tak, abyste nastavili správné napnutí bovdeny a následně dotáhněte montážní šroub.

4. Technická specifikace

Celková šířka	60 cm
Celková hloubka	73 cm
Rozměry sedátka	30 cm x 30 cm
Výška sedátka nad podkladem	53 cm
Nastavení výšky ruček	81–93 cm
Hmotnost	9,2 kg
Max. zatížení	135 kg
Max. zatížení košíku	5 kg
Barva rámu	tmavě modrá

5. Poznámky a doporučení

Společnost Timago International Group není zodpovědná za nesprávné používání výrobku, nedodržování bezpečnostních pravidel a také za použití, které není v souladu s jeho určením.

6. Údržba

Čištění

- Rám chodítka myjte vlhkým hadříkem a poté jej pečlivě osušte.
- Nepoužívejte ostré leštící přípravky, abyste nezničili ochranné vrstvy.
- Průběžně odstraňujte znečištění z pohyblivých prvků chodítka (závěsy, aretační šrouby, blokády).

7. Údaje týkající se záruky

Na všechny výrobky, které dodává naše společnost, se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listě, který jste obdrželi v okamžiku jejich zakoupení. Současně bychom vás rádi upozornili, že při případné reklamaci je nutné předložit doklad o prodeji (fakturu nebo paragon), proto si jej uschovejte.

8. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem



Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky, které se týkají zdravotnických potřeb.

Kompletní nabídku najdete u našich distributorů. Zjistěte více na **www.timago.com**

Děkujeme, že jste si vybrali Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



II. vydání, datum aktualizace 29.03.2021