

NÁVOD K POUŽITÍ

SPRCHOVACÍ VOZÍK FS 7962L



CE



POUŽITÍ

Sprchovací vozík je kompenzační pomůckou, které uživatelé usnadňují provádět hygienické činnosti. Doporučuje se pro osoby se sníženou pohyblivostí a s onemocněním pohybového aparátu. Lze jej provozovat pouze s pomocí doprovodné osoby. Určeno pro použití v interiéru, v domácím i nemocničním prostředí.

ÚVOD

Před použitím se ujistěte, že výrobek nevykazuje žádné poškození, ke kterému by mohlo dojít během přepravy (viditelné a hmatatelné poškození, např. praskliny). Pokud tomu tak je, kontaktujte prosím prodejní místo. Poškozený výrobek nepoužívejte! Upozorňujeme, že při používání poškozeného výrobku může dojít k úrazu!

Důležité je, abyste si přečetli tuto příručku, která obsahuje důležité informace.

Máte-li dotazy ohledně používání výrobku, kontaktujte nás.


Rádi bychom také zdůraznili, že pokud si nejste jisti o vhodnosti používání této pomůcky vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

POPIS

Rám křesla je vyroben z hliníku. Toaletní sedátko s výřezem ve tvaru U a opěrka jsou vyrobeny z odolného PVC. Má odklopné područky, sklopnou opěrku nohou, zadní plná 6" kola a 4" přední kola s brzdou v otočných vidlicích.

SOUČÁSTI

- a. Zádová opěrka
- b. Područky
- c. Sedátko
- d. Aretační pojistka
- e. Zajišťovací šroub
- f. Opěrka nohou
- g. Brzda

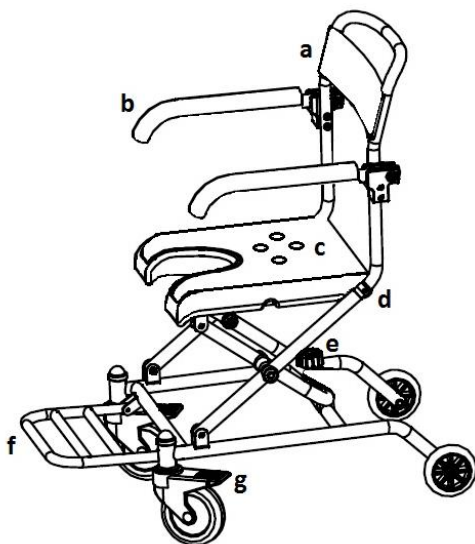

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Celková šířka: 54 cm

Vnitřní šířka: 44 cm

Celková hloubka: 74 cm

Výška sedáku od podlahy: 47 cm

Celková výška: 88 cm

Rozměry sedáku: 40 x 37,5 cm

Hmotnost: 6 kg

Nosnost: 100 kg

MONTÁŽ

Pozor! Při montáži a seřizování musí být dodrženy pokyny uvedené v návodu. Uživatelé se sníženou pohyblivostí mohou potřebovat pomoc třetí strany, která má odpovídající dovednosti.

Pozor! Nesedejte na vozík ani nepoužívejte vozík před prováděním všech činností týkajících se rozložení a montáže.

Krok 1. Nejdříve rozložte opěrku nohou (f).

Krok 2. Zvedněte sedadlo nahoru a zajistěte jej na základně zadního rámu utažením zajišťovacího šroubu (e).

Krok 3. Zasuňte trubky zádové opěrky do obou zadních trubek hlavního rámu a poté zajistěte opěrku pomocí aretačních pojistek (d).

Krok 4. Sklopte područky (b).

Vozík je nyní připraven k použití.

POUŽÍVÁNÍ

- Před každým použitím vozíku zkontrolujte účinnost brzd, stav rámu kol.
- Vozík nemá žádné nastavení šířky. Před použitím se prosím ujistěte, že šířka vozíku je vhodně přizpůsobena uživateli.
- Vozík je určen k provádění hygienických činností a pouze k překonávání krátkých úseků v místnostech. Vozík nemá tlumiče, proto se jeho dlouhodobé používání nedoporučuje. Vozík nemá tlumiče, proto se jeho dlouhodobé používání nedoporučuje.
- Při nastupování, vystupování, změně polohy uživatele a zastavení musí být brzdy zablokovány.
- Vozík by měl být umístěn co nejblíže místu přesezení uživatele, aby se dotýkal lůžka nebo jiného používaného sedadla, zadním kolem a přední části rámu. Pokud se uživatel nemůže přesunout sám, přeneste ho.
- Na vozíku sedte co nejdále a uprostřed sedadla, aby se zabránilo nestabilitě vozíku.

Pozor! Nepoužívejte vozík, pokud jsou zjištěny závady nebo nedostatky.

BRZDY

K zablokování kol stlačte nohou levou a pravou brzdovou páku. Pro odblokování kola zatáhněte nohou páku směrem nahoru.

OPERKA NOHOU

Při sedání na vozík a vstávání z vozíku, musí být opěrka nohou sklopena směrem nahoru. **Nepoužívejte opěrku nohou k podpoře při sedání a vstávání z vozíku kvůli nebezpečí převrácení vozíku a pádu.**

Pozor! Nestoupejte na opěrku nohou, protože hrozí nebezpečí poškození.

Když je uživatel již na vozíku, sklopte opěrku nohou do vodorovné polohy tak, aby při používání vozíku byly nohy uživatele na opěrce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- **Nepřekračujte** maximální nosnost křesla!
- Křeslo je určeno pro použití uvnitř budov **POUZE** na rovném plochém povrchu. Není dovoleno požívat křeslo na nestabilním povrchu.
- **Pozor! Vozík není určen k překonávání architektonických překážek (schody, rampy, prahy).**
- **Pozor!** Nejezděte přes úzké průjezdy, např. zárubné dveří, aniž byste se ujistili, že jejich šířka je větší než vnější šířka vozíku.
- **Pozor!** Vozík nesmí být používán k přepravě těžkých předmětů.
- **Není dovoleno** stoupat na rám křesla, sedák ani jinou část křesla.
- **Není dovoleno** připevňovat anebo zavěšovat předměty na rámu nebo loketní opěrky křesla, protože to může způsobit převrácení vozíku
- **Pozor!** Není dovoleno přenášet vozík s uživatelem.
- **Pozor!** Při nastupování, vystupování, změně polohy uživatele a zastavení musí být brzdy zablokovány.
- **Pozor!** Nikdy nenechávejte uživatele ve vozíku (ani když jsou brzdy zataženy) v blízkosti sjezdových ramp, na mezipatech v blízkosti schodů atd.!

VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ

- **Pozor!** Vozík je určen pouze a výhradně k provádění hygienických činností v prostorách určených k tomuto účelu. Vozík nemá tlumiče, proto se jeho dlouhodobé používání nedoporučuje.

- **Pozor!** Je nutné systematicky kontrolovat stav vozíku a neprodleně informovat prodávajícího o všech závadách, které vyvolávají pochybnosti o bezpečnosti používání vozíku.
- **Pozor!** Skladujte vozík v suchých místnostech pod 40 ° C a nevystavujte přímému slunečnímu záření, vodě, prachu, písku apod. Vozík musí být při skladování dostatečně chráněn (zakrytý) proti vnějším vlivům. Neskladujte při minusových teplotách, velmi vysoké vlhkosti (koupelny) a ve venkovních prostorech.
- **Pozor!** Používejte pouze originální náhradní díly od výrobce. V případě potřeby se obraťte na prodejce.
- **Pozor!** Neprovádějte sami žádné opravy nebo konstrukční úpravy.

Pozor! Výrobce nepřijímá zodpovědnost za škody či úrazy způsobené použitím výrobků v rozporu s touto instrukcí a účelem použití, a nedodržením bezpečnostních doporučení.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

Prohlídky

- Před každým použitím: Zkontrolujte stav mechanických součástí, správnost montáže demontovatelných prvků, správnost funkce brzd a správnost rozložení vozíku.
- Každé 4 týdny: Zkontrolujte stav mechanických součástí, promažte pohyblivé části, zkontrolujte správnost fungování brzd a stav sedadla.
- Každých 6 měsíců: V případě pochybností se doporučuje nechat vozík zkontrolovat v servisním místě určeném výrobcem (v souladu s platným ceníkem servisu).

Čištění

Křeslo pravidelně čistěte pomocí houbičky nasáklé vodou s jemnými čistícími prostředky určených pro PVC anebo mýdlem. Po čišťení křeslo vždy otřete do sucha. K čišťení nepoužívejte silné čistící prostředky, abrazivní prostředky, bělidlo ani žádné rozpouštědla (hrozí poškození a ztráta záruky).

Pozor! Pokud přípravek používá mnoho lidí (např. Pečovatel'ský dům), měly by být použity dezinfekční prostředky. K dezinfekci použijte prostředky určené k dezinfekci zdravotnických výrobků z PVC.

ZÁRUKA A SERVIS

Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na poškození vlivem opotřebení, způsobeného obvyklým užíváním. Záruka zaniká při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než odborným servisem, anebo s jeho souhlasem. Záruka se nevztahuje také na vady a poškození vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k údržbě a při nesprávném používání výrobku v rozporu s touto instrukcí.

REF	Referenční číslo		Výrobce
LOT	Sériové číslo		Datum výroby
SN	Číslo skupiny	EC REP	Zástupce v Evropské Unii
	Poznámka		Prosím přečtěte si návod
CE	Označení, že výrobce provedl posouzení shody výrobku v souladu s požadavky směrnice EU pro zdravotnické prostředky.		

Datum vytvoření návodu: 1.3.2019

Výrobce: Timago International Group Sp z o.o., Polsko