

NÁVOD K OBSLUZE

Toaletní a sprchový vozík 3v1

Kód výrobku: MASTER-TIM



1. Provedení

Vozík tvoří hliníkový rám s práškovým lakováním. Vozík je vybaven odklopnými područkami, které usnadňují nastupování a vystupování osob s omezením pohybu. Vozík je vybaven sedákem s klínem z PU, čtyřmi otočnými 5" kolečky s brzdami, odklopnými stupačkami a toaletní nádobou. Konstrukce vozíku umožňuje najetí na mísu.

Obsah sady: rám vozíku, sedák, čtyři 5" kolečka s brzdou, čtyři montážní zarážky kol, opěrka s područkami, dva šrouby zajišťující opěrku, pravá a levá stupačka, toaletní nádoba s víkem.

Součásti vozíku:



2. Použití


Toaletní a sprchový vozík je pomůcka pro osoby, které se obtížně pohybují, mají pohybové dysfunkce a omezení. Je určen pro používání ve vnitřních prostorech. Může být používán pouze s doprovodem.

Vozík plní sprchovací, přemísťovací a toaletní funkci, neboť je vybaven toaletní nádobou pod sedákem a čtyřmi otočnými koly. Jeho účelem je usnadnit hygienické fyziologické úkony uživatele. Zvláště je vhodný pro osoby, které se obtížně pohybují kvůli: ochrnutí, nadváze, degeneraci nebo deformaci končetin, degeneraci nebo poškození kloubů, poškození končetin nebo jejich amputaci, srdečním a cévním chorobám, poruchám krevního oběhu.

3. Montáž a používání



Obr. 1

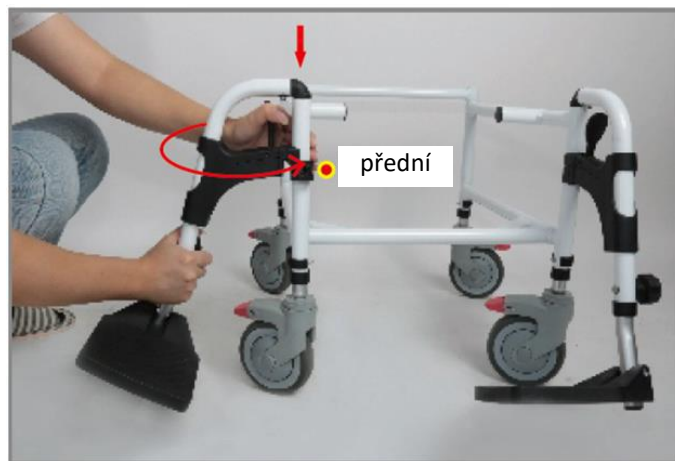

Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6



Obr. 7

Obr. 1 Nasadíte 4 kolečka na rám vozíku. Vyrovnáte otvory na potřebné výšce a zajistíte každé kolečko zarážkou (kroužek s trnem).
Pozor! Všechna kolečka musí být ve stejné výšce.

Obr. 2 Upevníte stupačky v otvorech v přední části rámu vozíku (předek označují plastové díly na rámu). Stupačky vkládejte z vnějšku a pak otočte dovnitř, až se zacvakne zarážka stupačky.

Obr. 3 Upevníte sedák na rám vozíku zatlačením, až zacvakne (předek sedáku označuje klín).

Obr. 4 Nasadíte opěradlo s područkami do otvorů vzadu na rám vozíku. Vyrovnáte otvory a zajistíte opěradlo dvěma fixačními šrouby.

Obr. 5 Nasadíte toaletní nádobu na vodící lišty odzadu sedáku.

Obr. 6 Vozík má 4 úrovně nastavení výšky.
Pozor! Všechna kolečka musí být ve stejné výšce.

Obr. 7 Stupačky mají 3 úrovně nastavení výšky – nastavování zajišťovacím šroubem.

Křeslo je připraveno k používání.

OBSLUHA KŘESLA

- Před každým použitím křesla zkontrolujte funkčnost brzd, konstrukci a stav kol. Také zkontrolujte správné namontování součástí a jejich správné seřízení.
- Vozík není šířkově nastavitelný, před zahájením používání se ujistěte, že jeho šířka uživateli vyhovuje.
- Křeslo je určeno pro jízdu pouze na krátké vzdálenosti ve vnitřních prostorech. Křeslo není odpružené, proto není vhodné pro dlouhodobé používání.

Pozor! Nepoužívejte křeslo, pokud zjistíte jakékoliv závady nebo nedostatky.

ODKLOPENÍ PODRUČEK

- Lehce zvedněte područku nahoru.
- **Nepoužívejte** područky jako pomůcku pro vstávání. Pokud to bude potřeba, přivolejte pomocníka.

BRZDY

- Kolečko zabrzdíte stlačením červeného pedálu brzdy nohou. Pro uvolnění kolečka stlačte nohou černou páku uvnitř červeného pedálu.

STUPAČKY

- Při nasedání na křeslo a sesedání z křesla musí být stupačky ve svislé poloze. **O stupačky se neopírejte při nasedání a sesedání, protože může dojít k převrácení křesla a nehodě.**

NASEDÁNÍ NA KŘESLO

- Při nasedání, sesedání, změně polohy uživatele a stání je nutné bezpodmínečně zajistit brzdy.
- Vozík musí být umístěn co nejbliž místa přesedání tak, aby se dotýkal lůžka nebo jiného používaného sedátka. Pokud uživatel není schopen samostatně nasednout, je potřeba jej na křeslo přemístit.
- Na křesle je nutné se posadit co nejhlouběji, uprostřed sedáku, aby

nedocházelo k nestabilitě.

4. Technická specifikace

Celková šířka	57 cm
Vnitřní šířka	45 cm
Celková hloubka	86 cm
Výška sedátka nad podkladem	49–56,5 cm
Výška celkem	94-101,5 cm
Rozměry sedátka	44 x 43 cm
Hmotnost	11,4 kg
Maximální nosnost	150 kg
Barva rámu	bílá

5. Poznámky a doporučení

Společnost Timago International Group nenese odpovědnost za nesprávné používání vozíku, nedodržování bezpečnostních zásad a používání, které není v souladu s účelem.

6. Údržba

Provádějte systematickou údržbu všech součástí vozíku:

- Sedák myjte studenou nebo teplou vodou vlhkým (ne však mokrým) hadříkem bez použití detergentů. Odolnější skvrny umyjte houbičkou.
- Plastové součásti čistěte navlhčeným hadříkem, případně s použitím prostředků na čištění plastů. Při této činnosti postupujte podle návodu výrobce čisticího prostředku a také v souladu s bezpečnostními pravidly pro používání detergentů.
- Po každém použití vyprázdněte a dezinfikujte toaletní nádobu a sedák. Prostředky na čištění toalet používejte v souladu s doporučením jejich výrobce.

7. Podmínky skladování a doprava

Nevystavujte výrobek přímému působení slunečních paprsků, vody a vlhka.

8. Údaje týkající se záruky

Na výrobek se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou specifikovány v záručním listu, který jste dostali s výrobkem. Pro případnou reklamaci si uschovejte doklad o prodeji (fakturu nebo paragon).

9. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem
	Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky, které se týkají zdravotnických potřeb.		

Kompletní nabídku najdete u našich distributorů.

Zjistěte více na **www.timago.com**

Děkujeme, že jste si vybrali Timago!