

NÁVOD K POUŽITÍ

Chodítko se čtyřmi koly

Kód produktu: RANGER



1. Provedení

Chodítko se čtyřmi koly, skládací, z hliníkového rámu. Chodítko je vybaveno brzdami s možností aretace v zabrzděné poloze, sedadlem s opěradlem, držákem na berle/hole, držákem na kelímky/lahve a příruční taškou. Chodítko má velká nafukovací kola o průměru 12" a výškově nastavitelné rukojeti s anatomickými úchyty. Konstrukce je založena na křížovém rámu a oválném průřezu trubek, což výrazně zvyšuje odolnost proti axiálnímu tlaku.

Sada obsahuje: nosný rám chodítka se sedadlem, přední kola, zadní kola s nožičkami, opěradlo, nákupní tašku.

Součásti chodítka:

1. Rukojeť
2. Nastavitelná trubka rukojeti
3. Brzda s parkovacím systémem
4. Nastavovací svorka
5. Opěradlo
6. Sedadlo s rukojetí
7. Háček na tašku
8. Přední kolo
9. Nastavení brzd
10. Zadní kolo
11. Bezpečnostní západka
12. Pedál
13. Držák berle/hole
14. Zajišťovací kolík
15. Držák na kelímek/lahev



2. Použití

Chodítka se čtyřmi koly je pomůcka určená pro osoby se sníženou schopností mobility, které potřebují stabilní podporu a pomoc při chůzi. Doporučuje se také starším lidem jako pomůcka pro udržení rovnováhy, zlepšení mobility a zajištění bezpečnosti před pády. Používání chodítka má také pozitivní vliv na návrat k aktivitě osob s postižením které mají problémy s lokomocí nebo vzpřímením. Zaručuje lepší stabilitu, podporu a bezpečnost při chůzi.

3. Montáž, demontáž, složení a nastavení chodítka

Montáž chodítka

- Vybalte všechny součásti z krabice a rozložte je na rovný povrch (rám se 2 zadními nohama spojenými brzdovým vedením, 2 přední kola, opěradlo, taška).
- Stisknutím zajišťovacích kolíků zasuňte obě zadní nohy s kolečky do otvorů v nosném rámu.
(pravá a levá noha jsou připojeny k pravé straně nosného rámu pomocí brzdového vedení).
- Stisknutím zajišťovacích kolíků zasuňte obě přední kola do otvorů v předních vidlicích nosného rámu.
- Opěradlo nasadte do úchytů na vnitřní straně rukojetí.
- Zavěste tašku na háčky.



Demontáž chodítka

- Chcete-li nosný rám rozložit, uchopte obě rukojeti a zatáhněte za ně směrem ven.
- Stiskněte boční lišty sedadla, dokud se úplně nevysune (aretační mechanismus cvakne).

Složení chodítka

- Chcete-li složit chodítko, zvedněte sedadlo za rukojeť a vytáhněte ji nahoru.
- Uchopte obě rukojeti a zatlačte je dovnitř.

Nastavení výšky rukojetí

Chcete-li nastavit výšku rukojetí:

- Sešlápnutím brzdy nastavte parkovací režim a znehybněte chodítko.
- Zatáhněte za seřizovací svorku a podržte ji.
- Nastavte výšku rukojetí.
- Uvolněním nastavovací svorky zajistěte nastavenou výšku rukojetí. Několikrát zatáhněte za rukojeť nahoru a dolů a zkontrolujte, zda je výška správně zajištěna.
- Podobným způsobem nastavte výšku druhé rukojeti.
- Obě rukojeti by měly být nastaveny ve stejné výšce.



Funkce brzdy

- Chcete-li chodítko zastavit, zatáhněte za rukojeť brzdy směrem nahoru a držte ji.
- Při stání nebo používání sedadla zajistěte brzdou parkovací svorkou zatažením za rukojeť brzdy směrem dolů.
- Chcete-li brzdou uvolnit, zatáhněte za rukojeť brzdy směrem nahoru.



Nastavení brzd

Odšroubujte držák lanka, vytáhněte jej do správné vzdálenosti a poté jej zajistěte utažením upínacího šroubu.



4. Technické parametry

Celková šířka	67 cm
Celková délka	75,5 cm
Hloubka sedadla	21 cm

Celková výška	89,5-102,5 cm
Výška sedadla od podlahy	59 cm
Hmotnost	10,8 kg
Maximální zatížení	136 kg
Maximální zatížení košíku	5 kg
Barva rámu	bílá

5. Připomínky a doporučení

Společnost Timago International Group neodpovídá za nesprávné použití chodítka, nedodržení bezpečnostních pravidel nebo použití k jinému než určenému účelu.

6. Údržba

Nosný rám je třeba očistit vlhkým hadříkem a poté jej důkladně osušit. Nepoužívejte drsné lešticí prostředky, protože hrozí poškození ochranných nátěrů. Běžně udržujte pohyblivé části chodítka (závěsy, svorky, zámky) čisté.

7. Podmínky skladování a přepravy

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, vodě ani vlhkosti.

8. Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou popsány v záručním listu, který jste obdrželi. Doklad o nákupu (účtenka nebo faktura) musí být uchován pro účely záruky.

9. Popis

	Referenční číslo		Výrobce
---	------------------	---	---------

	Číslo šarže		Datum výroby
---	-------------	---	--------------

	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem k použití
	Výrobce posoudil shodu se základními požadavky na zdravotnické prostředky.		

Celý sortiment je k dispozici u našich distributorů. Více informací najdete na **www.timago.com**

Děkujeme, že jste si vybrali Timago!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka - Spółka komandytowa [*Společnost s ručením omezeným a komanditní společnost*]

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



07/2023(I)