

NÁVOD K POUŽITÍ

Toaletní křeslo polstrované

Kód produktu: **BLUE-TIM**




1. Provedení

Polstrované toaletní křeslo má ocelový rám s práškovým nástřikem. Má výškově nastavitelné nohy s protiskluzovými gumovými nástavci. Nastavení umožňuje přizpůsobit produkt individuálním potřebám pacienta a područky podporují stabilitu a bezpečnost používání. Křeslo je vybaveno WC sedátkem a snadno vyjímatelnou plastovou sanitární nádobou. Měkký, čalouněný sedák s opěradlem zvyšuje komfort používání.

Součástí balení: rám křesla s opěradlem, nohy (4 ks), kolíkové zámky nohou (4 ks), měkké sedátko, sanitární nádobu.

Součásti:

- a. rám s opěrkou
- b. měkký sedák
- c. nohy
- d. sanitární nádoba
- e. protiskluzové nástavce

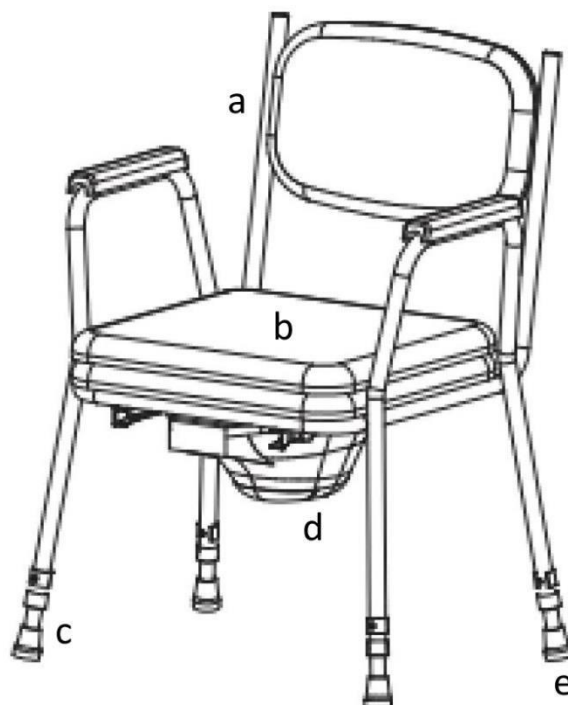

2. Účel použití

Toaletní křeslo je kompenzační pomůckou, která uživateli pomáhá provádět hygienické činnosti. Doporučuje se lidem, kteří mají problémy se samostatným pohybem, s dysfunkcemi a pohybovými omezeními a

lidem, kteří ztratili schopnost samostatně sedat a vstávat. Židle slouží jako toaleta díky sanitární nádobě pod sedátkem. Usnadňuje uživateli fyziologické a pečovatelské činnosti.

3. Montáž, nastavení a používání

Montáž toaletního křesla

Krok.1. Otočte rám židle a vložte čtyři nohy do montážních otvorů. Nohy zajistěte pomocí kolíkových zámků.

Krok 2. Otočte křeslo a položte jej nohama zem.

Pozor: všechny nohy musí být nastaveny na stejné úrovni.

Všechny nohy musí stát pevně na zemi.

Krok 3. Vložte sanitární nádobu pomocí vodítek pod sedadlo.

Krok 4. Umístěte měkký sedák na záchodové prkénko.

Nastavení výšky

Chcete-li nastavit výšku křesla, vytáhněte kolíkový zámek nohy, vyberte vhodnou výšku nohy a poté uzamkněte zpět nastavenou výšku pomocí kolíkového zámku. Opakujte na všech nohách.

Nohy jsou nastavitelné po 2,5 cm.

Pozor: všechny nohy musí být nastaveny na stejné úrovni.

Všechny nohy musí stát pevně na zemi.

Používání

Zvedněte měkký sedák a poté sejměte víko sanitární nádoby. Po použití přikryjte nádobu víkem a na záchodové prkénko položte měkký sedák.

Pozor: Po každém použití nezapomeňte nádobu vyprázdnit.

4. Technická specifikace

Celková šířka	59 cm
Vnitřní šířka	55 cm
Celková hloubka	47 cm
Výška opěrky	42 cm
Výška sedáku od podlahy	43-53 cm
Celková výška od podlahy	81-91 cm
Rozměry sedáku	43 cm x 46 cm
Hmotnost	7,8 kg
Maximální zatížení	136 kg
Barva	modrá

5. Připomínky a doporučení

Timago International Group nenese odpovědnost za nesprávné použití výrobku, nedodržení bezpečnostních pravidel nebo za použití k jinému než určenému účelu použití.

6. Údržba

Technický stav křesla byste měli sami pravidelně kontrolovat:

- Toaletní křeslo by mělo být pravidelně čištěno pouze vodou a jemnými čisticími prostředky. Důkladně osušte.
- **K čištění nepoužívejte:** lešticí prostředky, silné čisticí prostředky, abrazivní prostředky, bělidla, benzín, rozpouštědla.
- Po každém použití vyprázdněte a vydezinfikujte sanitární nádobu a záchodové prkénko.

7. Skladovací a přepravní podmínky

Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření, vodě nebo vlhkosti.

8. Podrobnosti o záruce

Na produkt se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou popsány v záručním listu, který jste obdrželi. Pro účely záruky si uschovejte doklad o koupi (účtenka nebo faktura).

9. Symboly

	Kód výrobku		Výrobce
	Šarže		Datum výroby
	Výrobní číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Přečtěte si návod
	Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky na zdravotnické prostředky.		



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



03/2024(I)