

Čtyřkolové ocelové chodítko

Kód výrobku TGR-R RS 881

1. Provedení


Čtyřkolové skládací chodítko s ocelovým rámem s práškovým lakem. Chodítko je vybaveno brzdami s parkovací zarážkou, sedátkem s odnímatelným tácem a košíkem. 8" pryžová kola a výškově nastavitelná madla s anatomickými úchopy.

Sada obsahuje:

- Rám chodítka se sedátkem
- Dvě madla s brzdami
- Košík
- Tác
- Zajišťovací šrouby – 2 ks

Součásti chodítka:

- a. madlo
- b. brzda
- c. zajišťovací šroub
- d. jištění složení rámu

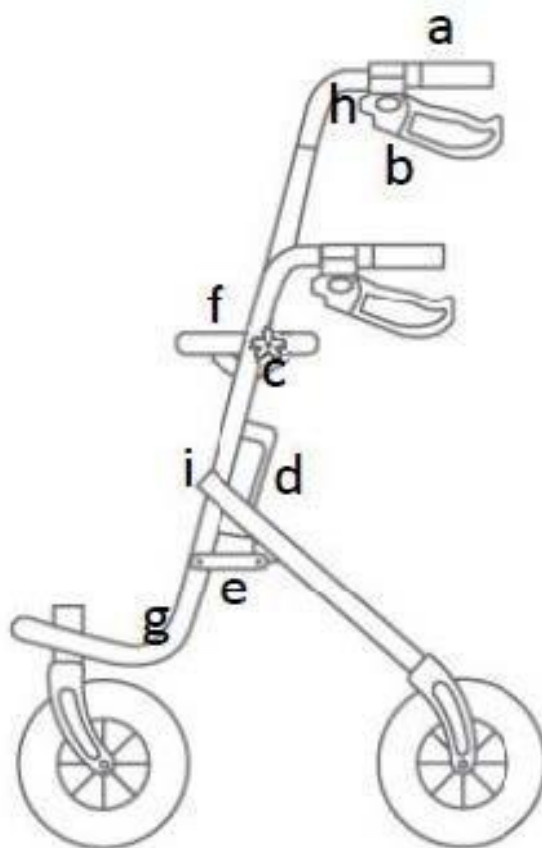

e. příčný závěs

f. sedák

g. držák na francouzské hole

h. horní nastavení brzdy

i. dolní nastavení brzdy

2. Použití

Čtyřkolové chodítka je pomůcka, která je určena pro osoby se sníženou pohyblivostí, které potřebují silnou podporu a jištění při chůzi. Je vhodné také pro seniory, kterým pomáhá udržovat rovnováhu, zlepšuje komfort při pohybu a chrání před pádem. Používání chodítka podporuje obnovení aktivity a vertikalizaci osob s pohybovými obtížemi. Zajišťuje lepší stabilitu, podporu a bezpečí při chůzi.

3. Montáž

Rozložení a složení chodítka

- Nejprve nasadíte madla do montážních otvorů v požadované výšce a utáhněte zajišťovací šrouby. Osa madel by měla být rovnoběžná se zadními koly a brzdová lanka by měla být vpředu.
- Chodítka rozložíte zatlačením na příčnou trubku pod sedátkem tak, aby se úplně rozložily závěsy na vnějších stranách chodítka.
- Košík zavěste vpředu pod úroveň sedátka.
- Táč můžete nasadit na sedátko tak, že zasunete jeho držáky do montážních otvorů.
- Odstraňte plastové krytky kol.
- Při skládání chodítka pro dopravu nejprve chodítka zabrzdíte brzdou silným zatažením za páku dolů. Pak současně stlačíte prvek bránící složení chodítka, který je na pravé straně rámu, a

zatáhněte nahoru za příčnou trubku. Můžete demontovat košík a tác.

Funkce brzd

- Pokud chcete chodítko zastavit, zatáhněte za brzdovou páku nahoru k madlu a držte ji.
- Při zastavení nebo používání sedátka brzdu zabrzdíte zatažením brzdové páky dolů.
- Pro odbrzdění brzdy zatáhněte brzdovou páku nahoru.

Nastavení výšky madel

Pokud chcete nastavit výšku madel, uvolněte zajišťovací šrouby na vnějších stranách rámu, zvolte požadovanou výšku trubky a zašroubujte zpět zajišťovací šrouby. Madla nastavte ve stejné výšce.

Nastavení brzd

Horní nastavení brzdy: Uvolněte držák lanka, lanko natáhněte na potřebnou délku a zajistěte ho zajišťovacím šroubem. **Dolní nastavení brzdy:** Plochým klíčem uvolněte upevňovací šroub, zatáhněte za černé lanko brzdy a upravte jeho natažení, pak přišroubujte upevňovací šroub.

4. Technická specifikace

Šířka celkem	57 cm
Hloubka celkem	65 cm
Rozměry sedátka	38 cm x 16 cm
Výška sedátka nad podložkou	60 cm
Nastavení výšky madel	75-98 cm
Hmotnost	10,8 kg
Max. nosnost	135 kg
Max. nosnost nákupního košíku	12 kg

Barva rámu	tmavomodrá
------------	------------

5. Poznámky a doporučení

Společnost Timago International Group nenese odpovědnost za nesprávné používání chodítka, nedodržování bezpečnostních zásad a používání, které není v souladu s účelem.

6. Údržba

- Rám chodítka očistěte vlhkým hadříkem a pak ho důkladně osušte.
- Nepoužívejte silné lešticí prostředky, neboť tím může dojít k poškození ochranných nátěrů.
- Průběžně odstraňujte zašpinění pohyblivých dílů chodítka (závěsů, zajišťovacích šroubů, zajišťovacích prvků).

7. Údaje týkající se záruky

Na všechny výrobky, které dodává naše společnost, se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listě, který jste obdrželi v okamžiku jejich zakoupení. Současně bychom vás rádi upozornili, že při případné reklamaci je nutné předložit doklad o prodeji (fakturu nebo paragon), proto si jej uschovejte.

8. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem
	Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky, které se týkají zdravotnických potřeb.		

Úplná nabídka je dostupná u našich distributorů.

Více informací je na **www.timago.com**

Děkujeme že jste si vybrali Timago!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



II. vydání, datum aktualizace 29.03.2021