

NÁVOD K OBSLUZE

Vanička na mytí hlavy se sprchou

Kód výrobku: EASY SHOWER



1. Úvod

Před zahájením používání výrobku se přesvědčte, zda zařízení nebylo oběhem dopravy poškozeno. Pokud se tak stalo, kontaktujte, prosím, prodejní místo.

Dále je důležité seznámit se s tímto návodem, který obsahuje důležité informace pro uživatele.

Pokud máte dotazy k používání zařízení, kontaktujte nás, prosím. Naši zaměstnanci vám průběžně poskytnou nezbytné informace.

Současně vás chceme upozornit, že pokud máte dotazy z jiné oblasti, než je používání zařízení, obraťte se, prosím, na lékaře, zdravotní sestru nebo fyzioterapeuta.

2. Provedení

Přenosná, nafukovací vanička na mytí hlavy s vypouštěcím otvorem vyrobená z PVC je měkká a pohodlně se používá. Dvojitě vzduchové komory jsou zabezpečením proti vylití vody / mýdlové vody.

Sada obsahuje:

- Vaničku



- Nádobu na vodu
- Sprchu
- Vypouštěcí hadici
- Pumpičku
- Držák nádoby

3. Použití

Sada na mytí hlavy umožňuje mytí pacientovy hlavy v poloze ležmo. Je doporučována zejména pro domácí použití během péče jak o osoby upoutané na lůžko, tak o starší osoby, které mají problém se zakloněním hlavy a s předklonem.




4. Způsob používání

- V první řadě je vaničku nutné napumpovat pumpičkou a dále zavřít ventil pro vypouštění vody, který je na dně vaničky. Ve vaničce lze používat vodu do 50 °C.
- Nádobu na vodu spojte se sprchou
- Nádobu naplňte vodou teplou max. 50 °C. Nádobu lze pomocí

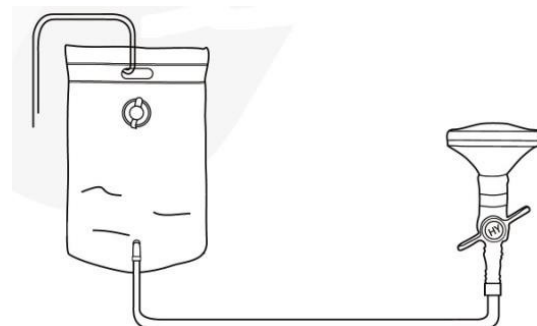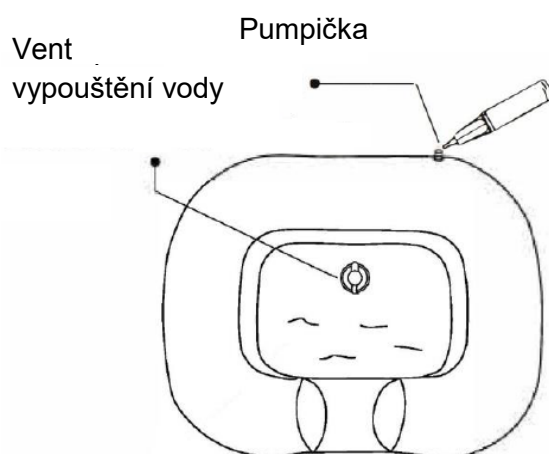

držáku pověsit na stojanu nebo na stěně.

- Připravte si kbelík a vložte do něj vypouštěcí hadici. Abyste zajistili správné vypuštění vody, zkontrolujte, zda není vypouštěcí hadice zalomená.
- Umístěte vaničku tak, aby byl krk ve výřezu vaničky a pacientova hlava ve vaničce. Následně můžete ventilem na sprše pustit vodu a regulovat její průtok.
- Po umytí hlavy otevřete vypouštěcí ventil, aby mohla voda odtéct vypouštěcí hadicí do kbelíku.

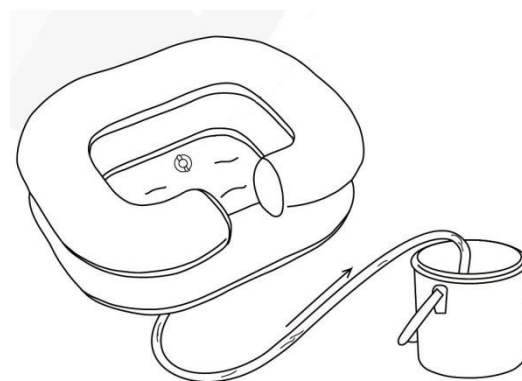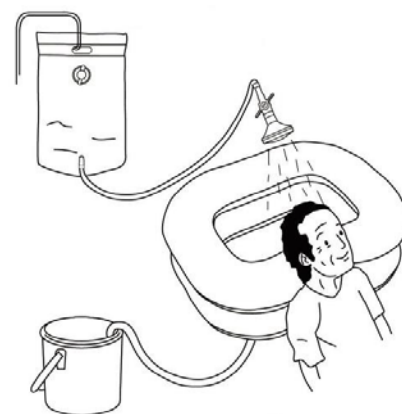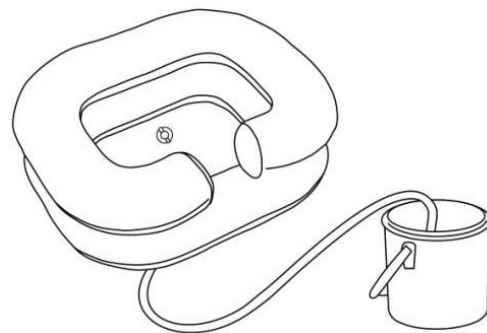

5. Technické údaje

Rozměry vaničky	65 x 50 x 25 cm
Hmotnost	800 g

Objem vaničky	10 litrů
Objem nádoby na vodu	8 litrů

6. Údržba a upozornění

- Po použití umyjte všechny prvky sady a nechte je zcela vysušit.
- Neskladujte sadu v prostředí s vysokou teplotou a/nebo vlhkostí.
- Vyvarujte se přímému kontaktu s ostrými předměty.
- Kontrolujte teplotu vody, abyste se vyhnuli popáleninám.
- Nepoužívejte detergenty, rozpouštědla ani éterické oleje.


7. Údaje týkající se záruky

Na všechny výrobky, které dodává naše společnost, se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listě, který jste obdrželi v okamžiku jejich zakoupení. Současně bychom vás rádi upozornili, že při případné reklamaci je nutné předložit doklad o prodeji (fakturu nebo paragon), proto si jej uschovejte.

Jako uživatelsky přívětivá společnost dodáváme výhradně výrobky, které jsou ověřeny s ohledem na materiál, kvalitu a funkčnost.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se provádění servisu, kontaktujte nás.

8. Označení

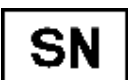	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem
	Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky, které se týkají zdravotnických potřeb.		