

# NÁVOD K OBSLUZE

## Stolek přilůžkový



### Kód produktu: TableTIM



**1.Provedení** Polohovací stolek k lůžku má kovový rám ve tvaru písmene C. Má nastavitelnou desku, na kterou lze umístit předměty, a kolečka s brzdou, která zajišťují mobilitu a pohyb nad postelí.

#### Součásti základny:

- a. Rám
- b. Základna s kolečky (2 ks)
- c. Rám pro upevnění desky
- d. Kolík pro uchycení desky
- e. Motýlková matice
- f. Motýlkový šroub
- g. Průchodka
- h. Šroub a podložka (2 ks)
- i. Deska stolku (užitná plocha)

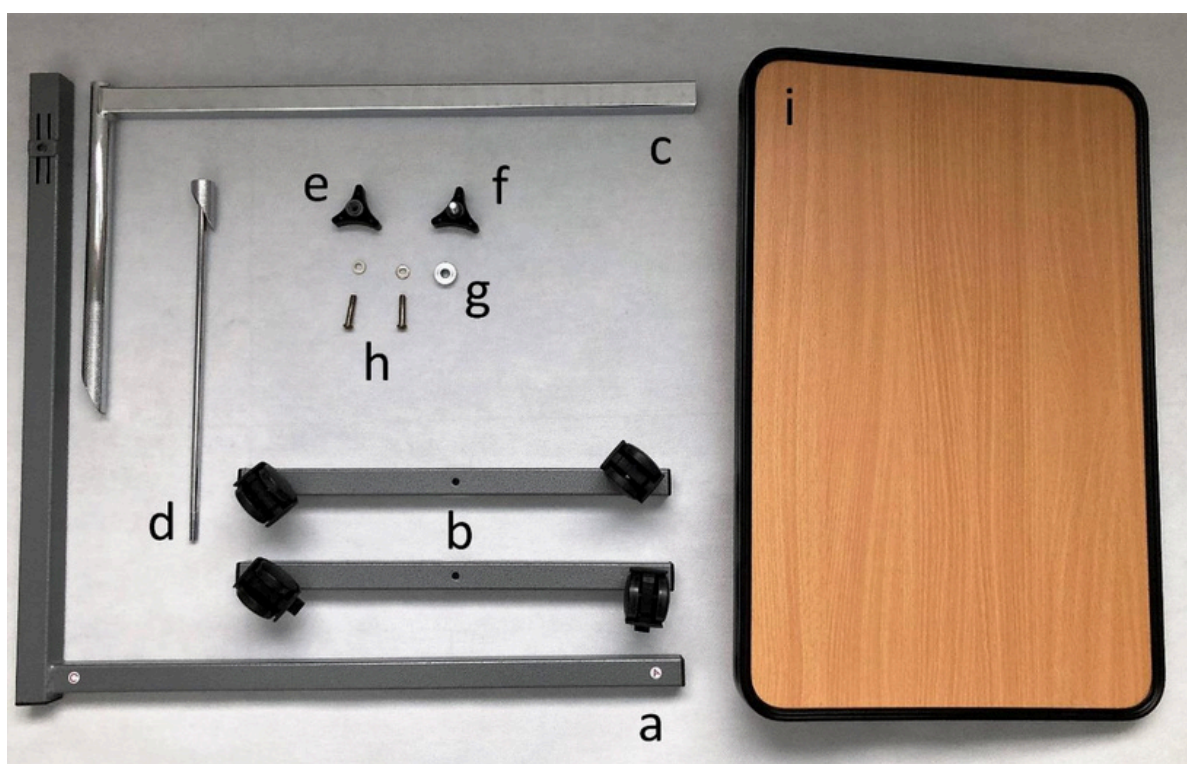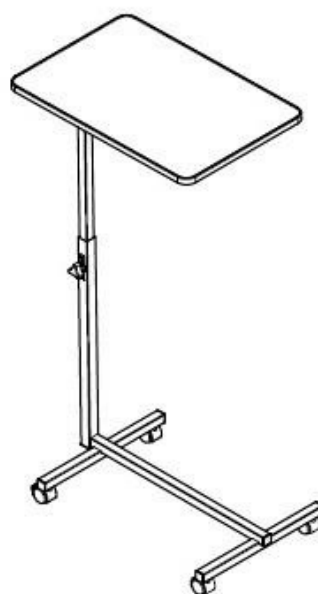

**2. Použití** Polohovací stůl k lůžku je určen k použití přímo nad lůžkem pacienta, jako plocha pro jídlo, čtení nebo psaní v posteli. Výrobek je určen k použití při péči ve zdravotnických zařízeních i v domácnosti.

### **3. Montáž a nastavení**

- přišroubujte obě základny s kolečky (b) na rám (a) - nezapomeňte odpovídajícím způsobem sladit označení písmen - písmeno "A" z rámu s písmenem "A" základny s kolečky, podobně pro písmena "B" / "C" / "D",
- po přišroubování základny ji postavte na 4 kolečka a zablokujte brzdy kol pro další montáž,
- vložte rám desky (c) do čtvercového otvoru rámu (a),
- vložte kolík pro uchycení desky (d) do šikmého výřezu rámu desky (c) tak, aby se oba výřezy překrývaly,
- vložte průchodku (g) do kruhového otvoru v rámu desky (c) na vyčnívajícím závitu tak, aby se dříve vložený kolík desky (d) nepohnul,
- našroubujte montážní matice (e) na vyčnívající závit kolíku (d) - nedotahujte motýlek pevně - utáhněte jej jen natolik, aby nevypadl,
- umístěte desku (i) na připravený rám. Abyste si usnadnili montáž desky, uchopte ji jednou rukou za trubku na spodní straně desky. Po nasazení desky utáhněte motýlkovou matici (e),
- upevněte motýlkový šroub (f) do otvoru v rámu (a) a utáhněte jej,

#### **Nastavení sklonu desky (užité plochy)**

- chcete-li nastavit úhel desky, uvolněte motýlkovou matici (e) na boku desky.
- po nastavení správného úhlu utáhněte motýlkovou matici (e)

#### **Nastavení výšky desky**

- chcete-li nastavit výšku desky, povolte motýlkový šroub (f) umístěný na základním rámu (a).
- po nastavení správné výšky utáhněte motýlkový šroub (f)

#### **Brzdy**

- brzdy kol musí být po dobu používání stolku zablokovány

#### 4. Technické parametry

Rozměry (D x Š)	60,5 cm x 40,2 cm
Rozměry desky	60 x 40 cm
Nastavení úhlu desky	0° - 90°
Nastavitelná výška	72 – 112 cm
Hmotnost	6,7 kg
Maximální zatížení	10 kg
Průměr kol	1,50"

#### 5. Připomínky a doporučení

**Společnost Timago International Group neodpovídá za nesprávné použití výrobku, nedodržení bezpečnostních pravidel nebo použití k jinému než určenému účelu.**






#### 6. Údržba

Výrobek je třeba očistit vlhkým hadříkem a poté jej důkladně osušit. Nepoužívejte drsné lešticí prostředky, protože hrozí poškození ochranných nátěrů. Běžně udržujte pohyblivé části výrobku (závěsy, upínací šrouby, zámky) čisté.

#### 7. Podmínky skladování a přepravy

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, vodě ani vlhkosti.

## 8. Popis

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šárže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem k použití
	Výrobce posoudil shodu se základními požadavky na zdravotnické prostředky.		

Celý sortiment je k dispozici u našich distributorů. Více informací najdete na

[www.timago.com](http://www.timago.com)

Děkujeme, že jste si vybrali Timago!