

NÁVOD K POUŽITÍ

Sprchový a toaletní vozík

s polohovatelným sedadlem a opěrkou hlavy 3v1

Kód produktu: MASTER-TIM PLUS



1. Provedení

Vozík je vyroben z práškově lakovaného hliníkového rámu. Má otočné loketní opěrky pro snadné sedání a vstávání osob se sníženou mobilitou a nastavitelný úhel opěradla. Je vybaven sedadlem s klínem z PU, opěrkou hlavy, čtyřmi 5" otočnými koly s brzdami, odklopitelnými stupačky a toaletní nádobou. Konstrukce vozíku umožňuje jeho nasazení na běžnou toaletní mísu.

Sada obsahuje: rám vozíku, sedadlo, opěrku hlavy, trubku opěrky hlavy, dva zajišťovací šrouby opěrky hlavy, čtyři 5" kola s brzdami, čtyři montážní aretační šrouby kol, opěradlo s loketními opěrkami, dva nastavce na loketní opěrky, dva zajišťovací šrouby opěradla, pravou a levou stupačku s deskou, toaletní nádobu s víkem.

Součásti vozíku:



2. Použití

Toaletní a sprchovací vozík je pomůcka pro osoby, které mají problémy se samostatnou mobilitou, a pro osoby s poruchami a omezeními mobility. Vozík je určen pro použití v interiéru. Lze jej obsluhovat pouze s pomocí asistenta.

Vozík funguje jako sprchovací, přepravní a toaletní pomůcka díky toaletní nádobě pod sedadlem a čtyřem otočným kolečkům. Jejím cílem je usnadnit uživateli hygienické a fyziologické činnosti. Vozík doporučujeme zejména pro osoby s problémy s mobilitou způsobenými: paralýzou, nadváhou, degenerací nebo deformací končetin, degenerací nebo poškozením kloubů, poškozením končetin nebo jejich amputací, kardiovaskulárním onemocněním, poruchami krevního oběhu.

3. Montáž a použití



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

Obr.1 Připevněte sedadlo k rámu vozíku tak, že ji zatlačíte dolů, dokud nezapadne (přední část sedadla je označena klínem).

Namontujte opěradlo s loketními opěrky do otvorů v zadní části rámu vozíku. Zarovnejte otvory a zajistěte je dvěma zajišťovacími šrouby opěradla. Vložte toaletní nádobu do vodicích lišt na zadní straně sedadla.

Obr.2 Připevněte 4 kola k rámu vozíku. Vyrovnajte otvory ve správné výšce a zajistěte každé kolo zámkem kola (ráfek s kolíkem). Vozík má

čtyřstupňové nastavení výšky. Pozor! Všechna kola by měla být nastavena ve stejné výšce.

Obr.3 Nasadte stupačky do otvorů v přední části rámu vozíku (přední část je vymezena plastovými díly na rámu). Vložte stupačku z vnější strany a poté ji otočte dovnitř, dokud západka stupačky nezapadne na místo. Stupačky mají třípolohové výškové nastavení - nastavitelné pomocí aretačního šroubu M6.



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6

Obr.4 Oba nástavce loketní opěrky nasadte do montážních otvorů loketní opěrky a zajistěte je na místě zaklapnutím zajišťovacích kolíků.

Obr.5 Nasadte trubku opěrky hlavy do montážního otvoru v horní části opěradla, nastavte ji do požadované polohy a zajistěte zajišťovacím šroubem.

Obr.6 Nasadte opěrku hlavy do montážního otvoru trubky opěrky hlavy, nastavte ji do požadované polohy a zajistěte zajišťovacím šroubem.

Vozík je připraven k použití.

PROVOZ VOZÍKU

- Před každým použitím vozíku zkontrolujte funkčnost brzd, konstrukční vlastnosti a stav kol. Pozornost je třeba věnovat také správné instalaci jednotlivých součástí a jejich správnému nastavení.

- Vozík nemá nastavitelnou šířku, před použitím se ujistěte, že šířka vozíku je pro uživatele vhodná.
- Vozík je určen pouze pro krátké vzdálenosti v interiéru. Vozík nemá tlumiče nárazů, takže jeho dlouhodobé používání není vhodné.

Pozor! Vozík **nepoužívejte**, pokud zjistíte jakékoli závady nebo nedostatky.

SKLÁPĚNÍ LOKETNÍCH OPĚREK

- Jemným pohybem zvedněte loketní opěrku nahoru.
- **Nepoužívejte** loketní opěrky rukou jako pomůcku pro vstávání. V případě potřeby by měla být přivolána osoba, která vám pomůže.
- Nástavce na loketní opěrky lze kdykoli demontovat/odstranit, aby se vozík lépe používal.

BRZDY

- Chcete-li kolo zablokovat, sešlápněte nohou červený brzdový pedál. Chcete-li kolo odblokovat, sešlápněte nohou černou páčku uvnitř červeného pedálu.

STUPAČKY

- Pro sedání a vstávání z vozíku by měly být stupačky ve svislé poloze. **Při sedání a vstávání nepoužívejte stupačky jako podporu, protože hrozí riziko převrácení a pádu vozíku.**

SEDÁNÍ NA VOZÍK

- Při sedání a vstávání, změně polohy uživatele a zastavování je nutné zablokovat brzdy.
- Vozík by měl být umístěn co nejbližší prostoru pro přesun tak, aby byl v kontaktu s lůžkem nebo jiným používaným sedadlem. Pokud uživatel není schopen samostatného přesunu, měl by být přesunut na vozík.
- Ve vozíku se posaďte co nejhlouběji doprostřed sedadla, abyste zabránili nestabilitě výrobku.
- Nástavce na loketní opěrky lze kdykoli demontovat/odstranit, aby usnadnit sedání a vstávání z vozíku.

NASTAVENÍ ÚHLU SEDADLA S OPĚRADLEM

- Před nastavením úhlu je nutné zablokovat brzdy.
- Stiskněte a podržte nastavovací rukojeť a nastavte požadovaný úhel sedadla s opěradlem. Po nastavení požadovaného úhlu uvolněte nastavovací rukojeť.



4. Technické parametry

Celková šířka	54 cm
Vnitřní šířka	46 cm
Celková hloubka	106 cm
Výška sedadla od podlahy	55-61 cm
Celková výška	115-136 cm
Rozměry sedadla	44 x 44 cm
Hmotnost	13 kg
Maximální zatížení	150 kg
Nastavení sklonu	max. 30°

5. Připomínky a doporučení

Společnost Timago International Group neodpovídá za nesprávné použití vozíku, nedodržení bezpečnostních pravidel nebo použití k jinému než určenému účelu.

6. Údržba

Je třeba provádět pravidelnou údržbu součástí vozíku:

- Sedadlo lze čistit studenou nebo teplou vodou vlhkým (ne mokrým) hadříkem bez použití čisticích prostředků. Obtížnější skvrny je třeba čistit houbičkou.
- Plastové díly by se měly čistit vlhkým hadříkem, případně čisticím prostředkem na plasty. Při používání mycích prostředků přitom dodržujte pokyny výrobce a bezpečnostní pravidla.
- Po každém použití je třeba toaletní nádobu a sedátko vyprázdnit a vydezinfikovat. Používejte čisticí prostředky na toalety podle doporučení jejich výrobce.

7. Podmínky skladování a přepravy

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, vodě ani vlhkosti.

8. Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou popsány v záručním listu, který jste obdrželi. Doklad o nákupu (účtenka nebo faktura) musí být uchován pro účely záruky.

9. Popis

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo série		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem k použití
	Výrobce posoudil shodu se základními požadavky na zdravotnické prostředky.		

Celý sortiment je k dispozici u našich distributorů. Více informací najdete na

www.timago.com

Děkujeme, že jste si vybrali Timago!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka - Spółka komandytowa [*Společnost s ručením omezeným a komanditní společnost*]

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



09/2023(I)